

ETAPAS DEL REPROCESAMIENTO

1

Preparar
la carga




1

Preparar la carga

1.1 LIMPIEZA

- Asegurar una limpieza adecuada según las instrucciones del fabricante de Productos Sanitarios y la Norma ISO 17664.

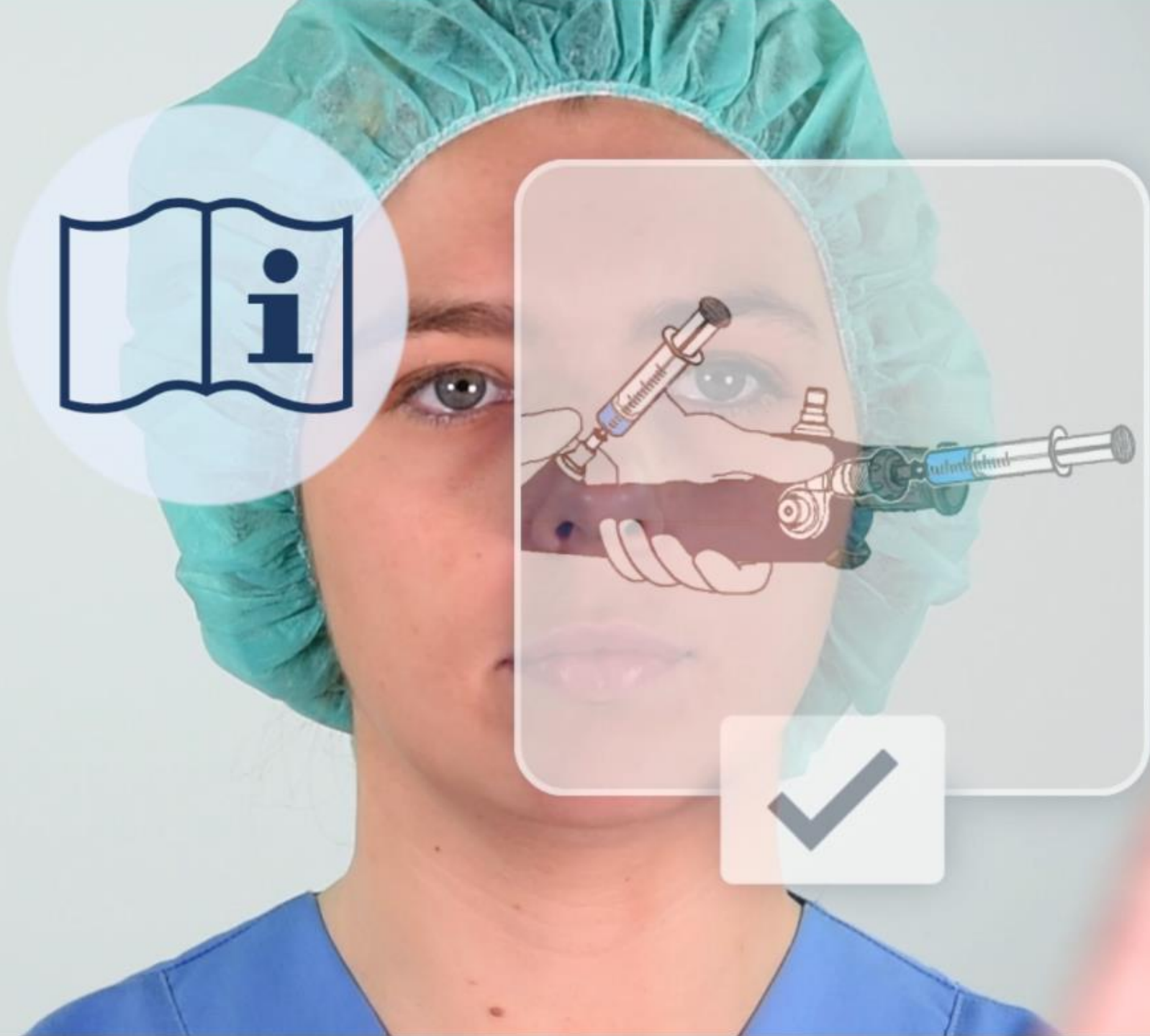

1

Preparar la carga

1.2 ACLARADO

- Se deben eliminar los restos de productos químicos.
- Asegúrese de que el agua de enjuague sea desmineralizada o destilada.



1

Preparar la carga

1.2 ACLARADO

- Se deben eliminar los restos de productos químicos.
- Asegúrese de que el agua de enjuague sea desmineralizada o destilada.



PROCEDIMIENTO **AUTOMÁTICO**



PROCEDIMIENTO **MANUAL**

1

Preparar la carga

1.2 ACLARADO

- Se deben eliminar los restos de productos químicos.
- Asegúrese de que el agua de enjuague sea desmineralizada o destilada.

ACLARADO



NO ACLARADO



1

Preparar la carga

1.3 SECADO

- Use un paño que no desprenda partículas.
- El aire debe ser de grado médico.



1

Preparar la carga

1.3 SECADO

- Use un paño que no desprenda partículas.
- El aire debe ser de grado médico.



1

Preparar la carga

1.4 INSPECCIÓN

- Asegurar un correcto secado para evitar largos tiempos de ciclo.

SECADO

**TIEMPOS DE CICLO
CORTOS**



SIN SECADO

**TIEMPOS DE CICLO
LARGOS**



1

Preparar la carga

1.5 ENSAMBLAJE

- Siga las instrucciones del fabricante para el montaje correcto.
- Utilice lubricante compatible con H_2O_2 cuando sea necesario.
- Use el ETO CAP para evitar daños en los endoscopios.



1

Preparar la carga

1.5 ENSAMBLAJE

- Siga las instrucciones del fabricante para el montaje correcto.
- Utilice lubricante compatible con H_2O_2 cuando sea necesario.
- Use el ETO CAP para evitar daños en los endoscopios.



1


Preparar la carga

1.5 ENSAMBLAJE


- Siga las instrucciones del fabricante para el montaje correcto.
- Utilice lubricante compatible con H_2O_2 cuando sea necesario.
- Use el ETO CAP para evitar daños en los endoscopios.



ETO CAP

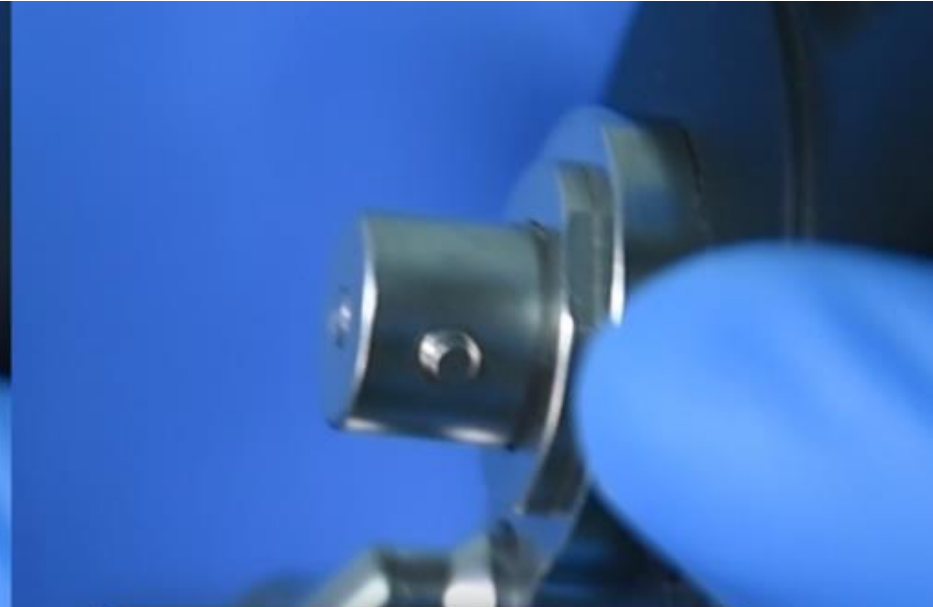

SIN ETO CAP

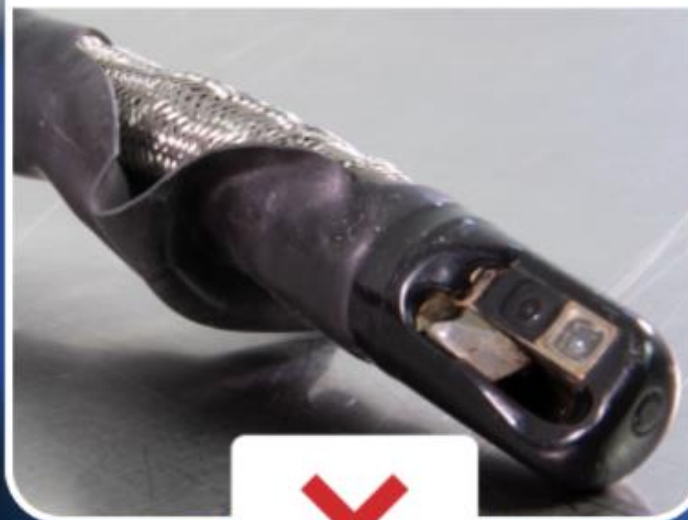


1

Preparar
la carga

1.6 EMBALAJE


Elija el correcto
Sistema de Barrera Estéril

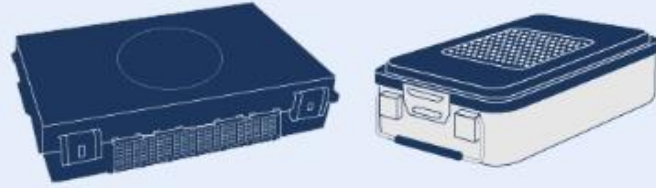

**CONTENEDOR
DE ESTERILIZACIÓN**



**BOLSAS
Y ROLLOS DE TYVEK®**

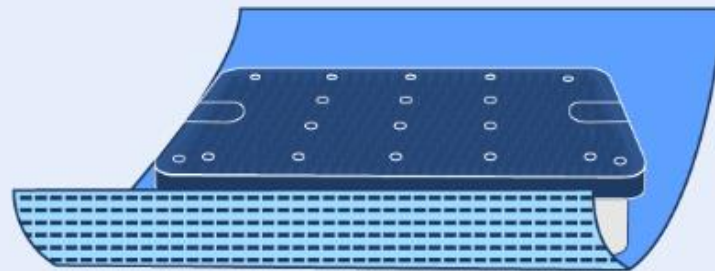


**HOJA DE POLIPROPILENO
PARA BANDEJA/CAJA**

1

Preparar la carga

1.6 EMBALAJE

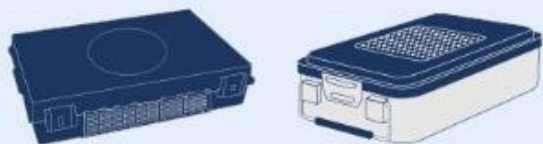


- Asegúrese de que está validado por el fabricante.
- Utilice filtros compatibles con el H₂O₂.



1

Preparar la carga

1.6 EMBALAJE

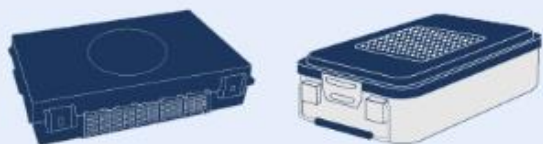

- Asegúrese de que está validado por el fabricante.
- Utilice filtros compatibles con el H₂O₂.

●●● matachana

H₂O₂



PLASMA
procesado
rosa-pink-rose



STEAM/FORM



STEAM
procesado
braun-marron
brown-marrón



FORM
procesado
grün-vert
green-verde



1

Preparar la carga


1.6 EMBALAJE



- Asegúrese que utiliza TYVEK®.
- Asegúrese de que la temperatura de sellado sea la correcta, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Sin pliegues.
- Verificar la compatibilidad de las etiquetas H₂O₂.

●●● **matachana**

TYVEK®

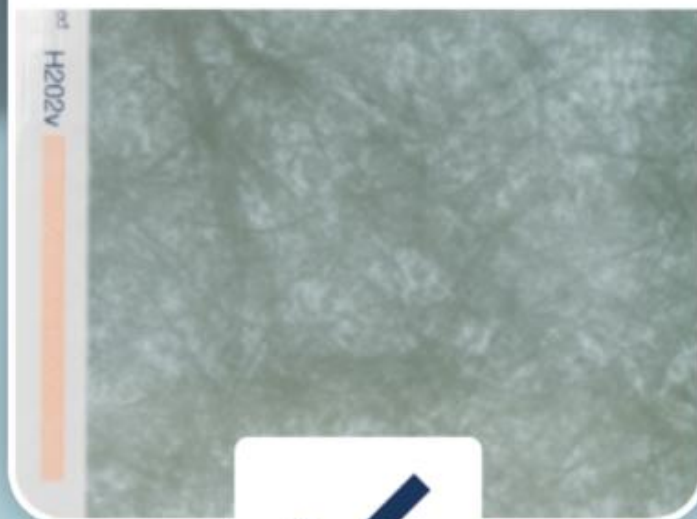

MIXTO



1

Preparar la carga

1.6 EMBALAJE



- Asegúrese que utiliza TYVEK®.
- Asegúrese de que la temperatura de sellado sea la correcta, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Sin pliegues.
- Verificar la compatibilidad de las etiquetas H₂O₂.

●●● matachana

H₂O₂

130°C



STEAM

180°C



1

Preparar la carga

1.6 EMBALAJE



- Asegúrese que utiliza TYVEK®.
- Asegúrese de que la temperatura de sellado sea la correcta, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Sin pliegues.
- Verificar la compatibilidad de las etiquetas H₂O₂.

SIN PLIEGUES



CON PLIEGUES



1

Preparar la carga

1.6 EMBALAJE



- Asegúrese que utiliza TYVEK®.
- Asegúrese de que la temperatura de sellado sea la correcta, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Sin pliegues.
- Verificar la compatibilidad de las etiquetas H₂O₂.

●●● matachana



009000887560



17/01/22



009000887560

Fecha: 17/07/21


N/S: 0120903930094

ARZ Q PRO

1

Preparar la carga

1.6 EMBALAJE

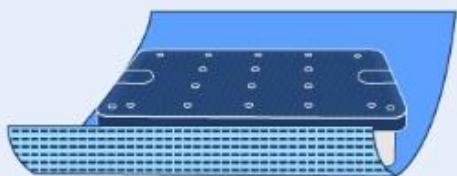

- Asegúrese de que sea polipropileno.
- Verifique que no haya pliegues.
- La cinta debe ser compatible con el H_2O_2 .

POLIPROPILENO




**CREPÉ/
TEJIDO SIN TEJER**



1

Preparar la carga

1.6 EMBALAJE

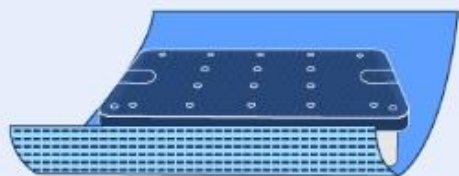


- Asegúrese de que sea polipropileno.
- Verifique que no haya pliegues.
- La cinta debe ser compatible con el H_2O_2 .

SIN PLIEGUES**CON PLIEGUES**

1

Preparar la carga


1.6 EMBALAJE

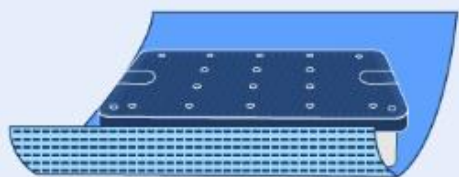

- Asegúrese de que sea polipropileno.
- Verifique que no haya pliegues.
- La cinta debe ser compatible con el H_2O_2 .

●●● matachana

H_2O_2

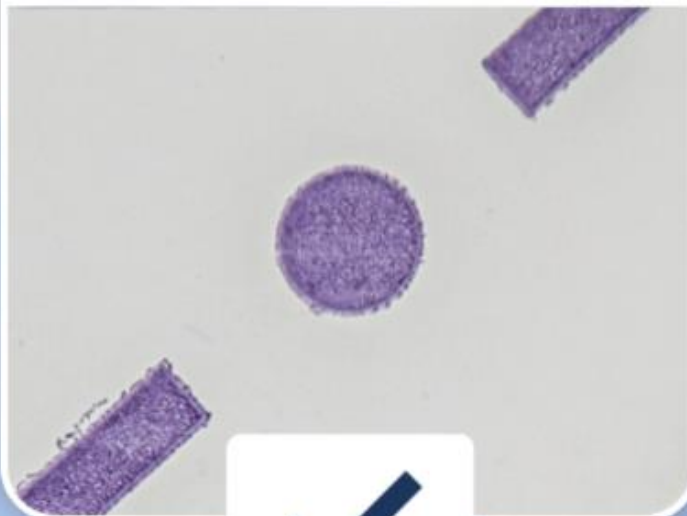

STEAM




1


Preparar
la carga

1.7 MONITORIZACIÓN

Diferentes aplicaciones de los Indicadores

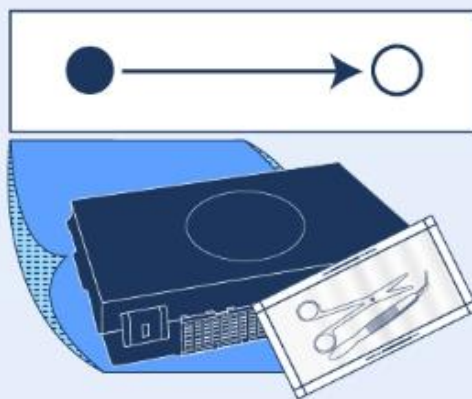

**CONTROL
DE LA CARGA**

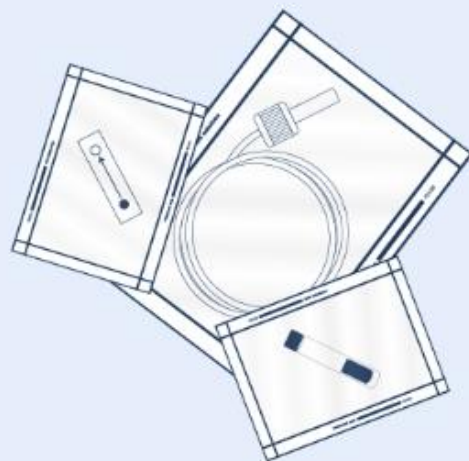


**LIBERACIÓN
DE LA CARGA**

1

Preparar la carga

1.7 MONITORIZACIÓN

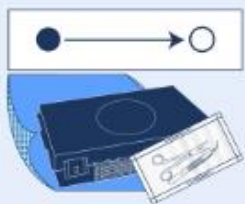

- Indicador de Tipo 4 en cada paquete.
- Asegúrese de que el material no cubre el Indicador.

●●● matachana



CESTA BANDEJA



ROLLO TYVEK®




POLIPROPILENO

1

Preparar la carga

1.7 MONITORIZACIÓN

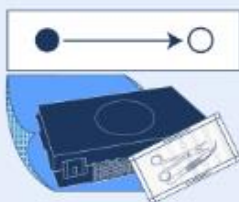

- Indicador de Tipo 4 en cada paquete.
- Asegúrese de que el material no cubre el Indicador.


●●● matachana



1

Preparar la carga

1.7 MONITORIZACIÓN

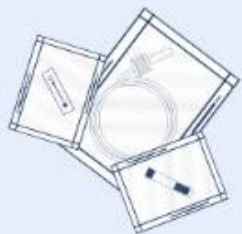

RAPID

- Liberación de la carga con Indicador Químico Tipo 4.

ADVANCED/STANDARD


- Liberación de la carga con test Helix.



1

Preparar la carga

1.7 MONITORIZACIÓN

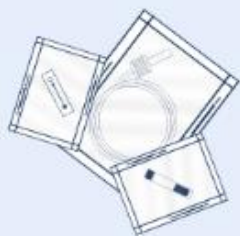

RAPID

- Liberación de la carga con Indicador Químico Tipo 4.

ADVANCED/STANDARD

- Liberación de la carga con test Helix.



1

Preparar la carga

1.7 MONITORIZACIÓN



OPCIONAL

- Liberación de la carga con Indicador Biológico según procedimiento de calidad del centro hospitalario.



© **ANTONIO MATACHANA, S.A.** 2020

COPYRIGHT

Reservados todos los derechos. Este contenido es propiedad intelectual de Antonio Matachana, S.A. Queda rigurosamente prohibida la reproducción total o parcial de la información incluida, así como su traducción, copia o manipulación, por cualquier medio o en cualquier tipo de soporte, sin la autorización expresa del titular de los derechos. La utilización no autorizada, así como la lesión de los derechos de propiedad intelectual o Industrial de Antonio Matachana, S.A., dará lugar a las responsabilidades legalmente establecidas.

CONTENIDO

Este es un vídeo promocional. Debido a la constante evolución de nuestros equipos los contenidos incluidos pueden sufrir algún cambio.