

# AUFBEREITUNGSSCHRITTE

2

Beschickung  
des Sterilisators >

# 2

## Beschickung des Sterilisators

### 2.1 INBETRIEBNAHME & AUFHEIZEN

- Drücken Sie auf das Display, um den Standby-Modus zu verlassen.
- Schließen Sie die Tür, um den Aufheizprozess zu beschleunigen.



# 2

## Beschickung des Sterilisators

### 2.1 INBETRIEBNAHME & AUFHEIZEN

- Drücken Sie auf das Display, um den Standby-Modus zu verlassen.
- Schließen Sie die Tür, um den Aufheizprozess zu beschleunigen.





# 2

## Beschickung des Sterilisators

### 2.2 BELADUNG VON BEUTELN

- Verwenden Sie die Einsätze zum Platzieren der Beutel.
- Vermeiden Sie Falten und Knicke.
- Kunststoffseite, ist der TYVEK®-Seite zugewandt.
- Beutel in vertikale Position bringen.
- Stapeln Sie die Beutel nicht auf.



# 2

## Beschickung des Sterilisators

### 2.2 BELADUNG VON BEUTELN

- Verwenden Sie die Einsätze zum Platzieren der Beutel.
- Vermeiden Sie Falten und Knicke.
- Kunststoffseite, ist der TYVEK®-Seite zugewandt.
- Beutel in vertikale Position bringen.
- Stapeln Sie die Beutel nicht auf.



**OHNE FALTEN**



**MIT FALTEN**





## 2

Beschickung  
des Sterilisators2.2 BELADUNG VON  
BEUTELN

- Verwenden Sie die Einsätze zum Platzieren der Beutel.
- Vermeiden Sie Falten und Knicke.
- Kunststoffseite, ist der TYVEK®-Seite zugewandt.
- Beutel in vertikale Position bringen.
- Stapeln Sie die Beutel nicht auf.

TYVEK® - KUNSTSTOFF

KUNSTSTOFF –  
KUNSTSTOFF

# 2

## Beschickung des Sterilisators

### 2.2 BELADUNG VON BEUTELN

- Verwenden Sie die Einsätze zum Platzieren der Beutel.
- Vermeiden Sie Falten und Knicke.
- Kunststoffseite, ist der TYVEK®-Seite zugewandt.
- Beutel in vertikale Position bringen.
- Stapeln Sie die Beutel nicht auf.





# 2

## Beschickung des Sterilisators

### 2.2 BELADUNG VON BEUTELN

- Verwenden Sie die Einsätze zum Platzieren der Beutel.
- Vermeiden Sie Falten und Knicke.
- Kunststoffseite, ist der TYVEK®-Seite zugewandt.
- Beutel in vertikale Position bringen.
- Stapeln Sie die Beutel nicht auf.

**NICHT GESTAPELT**



**GESTAPELT**





# 2

## Beschickung des Sterilisators

### 2.2 BELADUNG VON BEUTELN

- Für mehr Komfort ziehen Sie das Ablagefach heraus.
- Die Beutel dürfen die Kammerwand nicht berühren.
- Halten Sie den  $H_2O_2$ -Auslass frei.
- Die Beutel dürfen den Vakuumeinlaß nicht blockieren.



## 2

Beschickung  
des Sterilisators2.2 BELADUNG VON  
BEUTELN

- Für mehr Komfort ziehen Sie das Ablagefach heraus.
- Die Beutel dürfen die Kammerwand nicht berühren.
- Halten Sie den  $H_2O_2$ -Auslass frei.
- Die Beutel dürfen den Vakuumeinlaß nicht blockieren.





# 2

## Beschickung des Sterilisators

### 2.2 BELADUNG VON BEUTELN

- Für mehr Komfort ziehen Sie das Ablagefach heraus.
- Die Beutel dürfen die Kammerwand nicht berühren.
- Halten Sie den  $H_2O_2$ -Auslass frei.
- Die Beutel dürfen den Vakuumeinlaß nicht blockieren.



# 2

## Beschickung des Sterilisators

### 2.2 BELADUNG VON BEUTELN

- Für mehr Komfort ziehen Sie das Ablagefach heraus.
- Die Beutel dürfen die Kammerwand nicht berühren.
- Halten Sie den  $H_2O_2$ -Auslass frei.
- Die Beutel dürfen den Vakuumeinlaß nicht blockieren.





## 2

### Beschickung des Sterilisators

#### 2.3 BELADUNG DER VERPACKUNGEN

- Kleine Verpackungen in oberer Position.
- Sperrige Verpackungen in unterer Position.



## 2

## Beschickung des Sterilisators

### 2.3 BELADUNG DER VERPACKUNGEN

- Kleine Verpackungen in oberer Position.
- Sperrige Verpackungen in unterer Position.





# 2

## Beschickung des Sterilisators

### 2.4 MISCHBELADUNG

- Falls sich die Beutel nicht im Korb befinden, stapeln Sie sie nicht.
- Sperrige Verpackungen im unteren Fach.




# 2

## Beschickung des Sterilisators

### 2.4 MISCHBELADUNG

- Falls sich die Beutel nicht im Korb befinden, stapeln Sie sie nicht.
- Sperrige Verpackungen im unteren Fach.

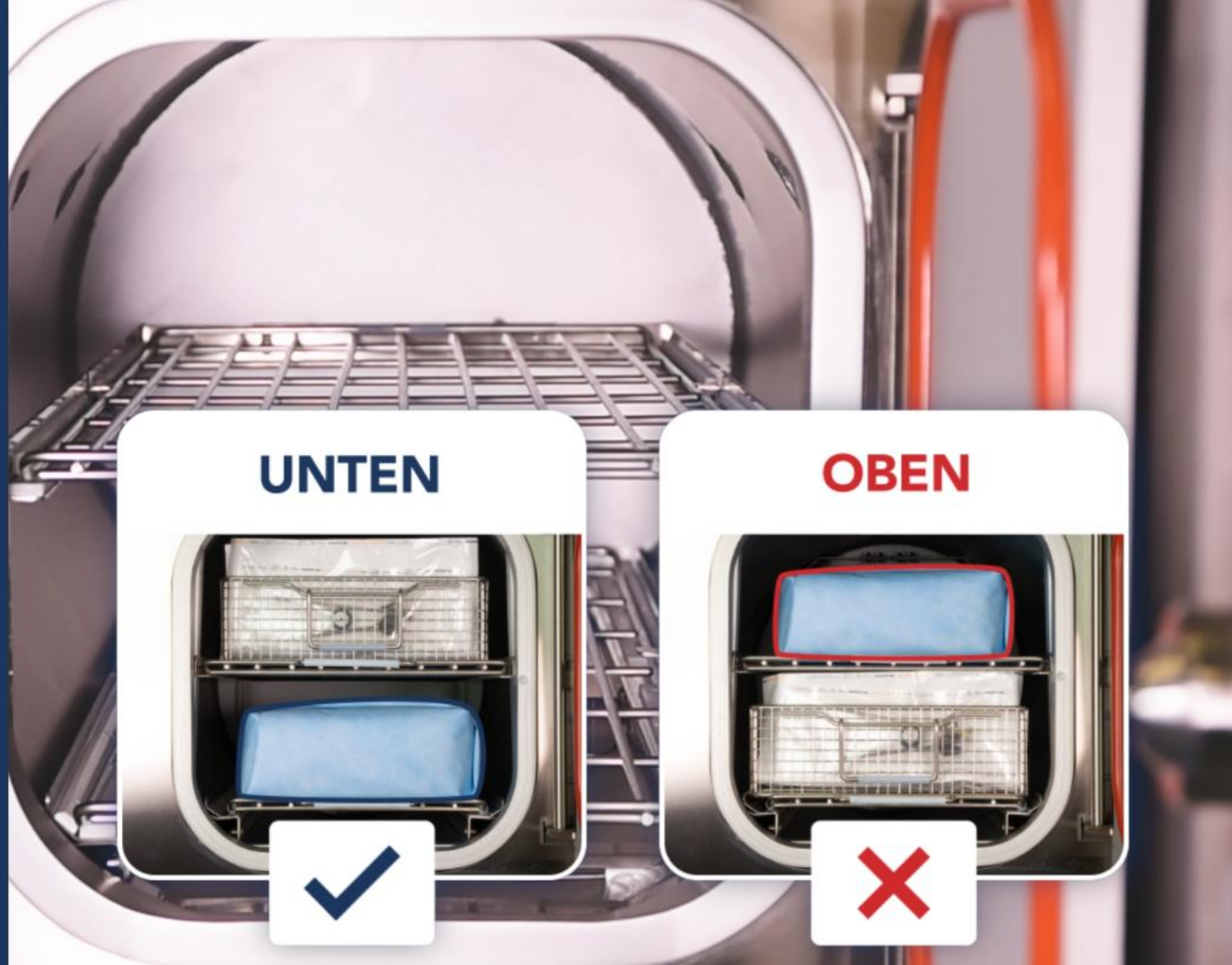



# 2

## Beschickung des Sterilisators

### 2.5 GROßVERPACKUNGEN

- Entfernen Sie das obere Fach, um Platz zu gewinnen.
- Verpackungen nicht stapeln.




# 2

## Beschickung des Sterilisators

### 2.5 GROßVERPACKUNGEN

- Entfernen Sie das obere Fach, um Platz zu gewinnen.
- Verpackungen nicht stapeln.

**NICHT GESTAPELT**

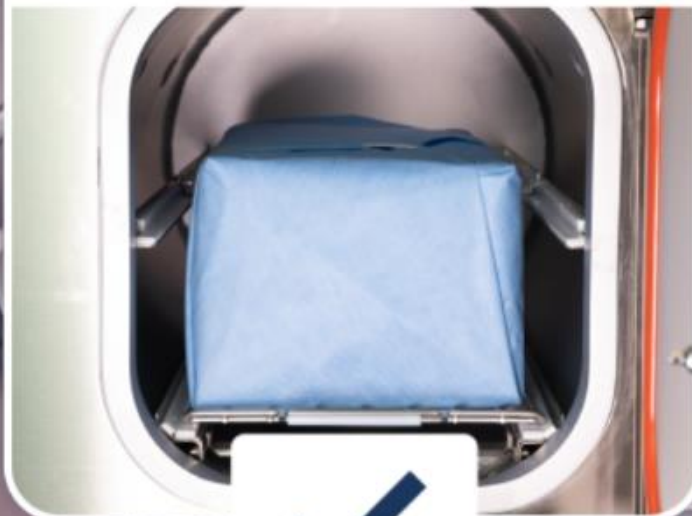

**GESTAPELT**





## 2

### Beschickung des Sterilisators

#### 2.6 SCHLIEßEN DER TÜR

- Stellen Sie sicher, dass die Beladung die Tür nicht blockiert.
- Automatisches Türverriegelungssystem. Drücken Sie nicht gegen die Tür.



# 2

## Beschickung des Sterilisators

### 2.6 SCHLIEßEN DER TÜR

- Stellen Sie sicher, dass die Beladung die Tür nicht blockiert.
- Automatisches Türverriegelungssystem. Drücken Sie nicht gegen die Tür.





© **ANTONIO MATACHANA, S.A.** 2020

## **URHEBERRECHT**

Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieses Dokuments ist geistiges Eigentum von Antonio Matachana, S.A. Die gesamte oder teilweise Reproduktion der in diesem Dokument enthaltenen Informationen, sowie deren Übersetzung, Kopie oder Manipulierung mit jedem Mittel und auf jedem Datenträger, sind ohne die ausdrückliche Genehmigung des Inhabers der Urheberrechte strikt verboten.

Die nicht erlaubte Benutzung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen, sowie die Verletzung der geistigen oder industriellen Urheberrechte von Antonio Matachana, S.A., haben die gesetzlich vorgesehenen Konsequenzen zur Folge.

## **INHALT**

Dies ist ein Werbevideo. Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Anlagen, kann sich der Inhalt dieser Dokumentation verändern.