

ETAPAS DEL REPROCESAMIENTO

2

Cargar
el esterilizador >

2

Cargar el esterilizador

2.1 PUESTA EN MARCHA Y PRECALENTAMIENTO

- Pulsar en la pantalla para salir del modo Stand-by.
- Cerrar la puerta para acelerar el proceso de precalentamiento.



2

Cargar el esterilizador

2.1 PUESTA EN MARCHA Y PRECALENTAMIENTO

- Pulsar en la pantalla para salir del modo Stand-by.
- Cerrar la puerta para acelerar el proceso de precalentamiento.



2

Cargar el esterilizador

2.2 CARGA DE BOLSAS

- Utilice las bandejas para colocar las bolsas.
- Evite los pliegues y las arrugas.
- Lado de plástico orientado hacia el lado de TYVEK®.
- Coloque las bolsas en posición vertical.
- No apilar las bolsas.



2

Cargar el esterilizador

2.2 CARGA DE BOLSAS

- Utilice las bandejas para colocar las bolsas.
- Evite los pliegues y las arrugas.
- Lado de plástico orientado hacia el lado de TYVEK®.
- Coloque las bolsas en posición vertical.
- No apilar las bolsas.



SIN PLIEGUES



CON PLIEGUES




2

Cargar el esterilizador

2.2 CARGA DE BOLSAS

- Utilice las bandejas para colocar las bolsas.
- Evite los pliegues y las arrugas.
- Lado de plástico orientado hacia el lado de TYVEK®.
- Coloque las bolsas en posición vertical.
- No apilar las bolsas.

TYVEK® - PLÁSTICO

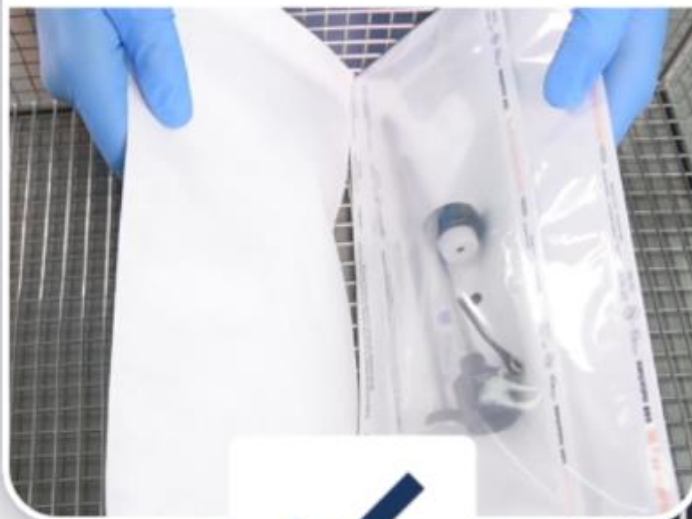

PLÁSTICO - PLÁSTICO



2

Cargar el esterilizador

2.2 CARGA DE BOLSAS

- Utilice las bandejas para colocar las bolsas.
- Evite los pliegues y las arrugas.
- Lado de plástico orientado hacia el lado de TYVEK®.
- Coloque las bolsas en posición vertical.
- No apilar las bolsas.



2

Cargar el esterilizador

2.2 CARGA DE BOLSAS

- Utilice las bandejas para colocar las bolsas.
- Evite los pliegues y las arrugas.
- Lado de plástico orientado hacia el lado de TYVEK®.
- Coloque las bolsas en posición vertical.
- No apilar las bolsas.

NO APILADO



APILADO



2

Cargar el esterilizador

2.2 CARGA DE BOLSAS

- Extraiga el estante para mayor comodidad.
- Las bolsas no deben tocar la pared de la cámara.
- Mantenga libre la salida del H_2O_2 .
- Las bolsas no deben bloquear la entrada de vacío.



2

Cargar el esterilizador

2.2 CARGA DE BOLSAS

- Extraiga el estante para mayor comodidad.
- Las bolsas no deben tocar la pared de la cámara.
- Mantenga libre la salida del H_2O_2 .
- Las bolsas no deben bloquear la entrada de vacío.



2

Cargar el esterilizador

2.2 CARGA DE BOLSAS

- Extraiga el estante para mayor comodidad.
- Las bolsas no deben tocar la pared de la cámara.
- Mantenga libre la salida del H_2O_2 .
- Las bolsas no deben bloquear la entrada de vacío.



2.2 CARGA DE BOLSAS

- Extraiga el estante para mayor comodidad.
- Las bolsas no deben tocar la pared de la cámara.
- Mantenga libre la salida del H_2O_2 .
- Las bolsas no deben bloquear la entrada de vacío.



2

Cargar el esterilizador

2.3 CARGA DE PAQUETES

- Paquetes pequeños en la posición superior.
- Paquetes voluminosos en la posición inferior.



2

Cargar el esterilizador

2.3 CARGA DE PAQUETES

- Paquetes pequeños en la posición superior.
- Paquetes voluminosos en la posición inferior.




2

Cargar el esterilizador

2.4 CARGA MIXTA

- Cuando las bolsas no estén en la cesta, no las amontone.
- Paquetes voluminosos se colocan en el estante inferior.

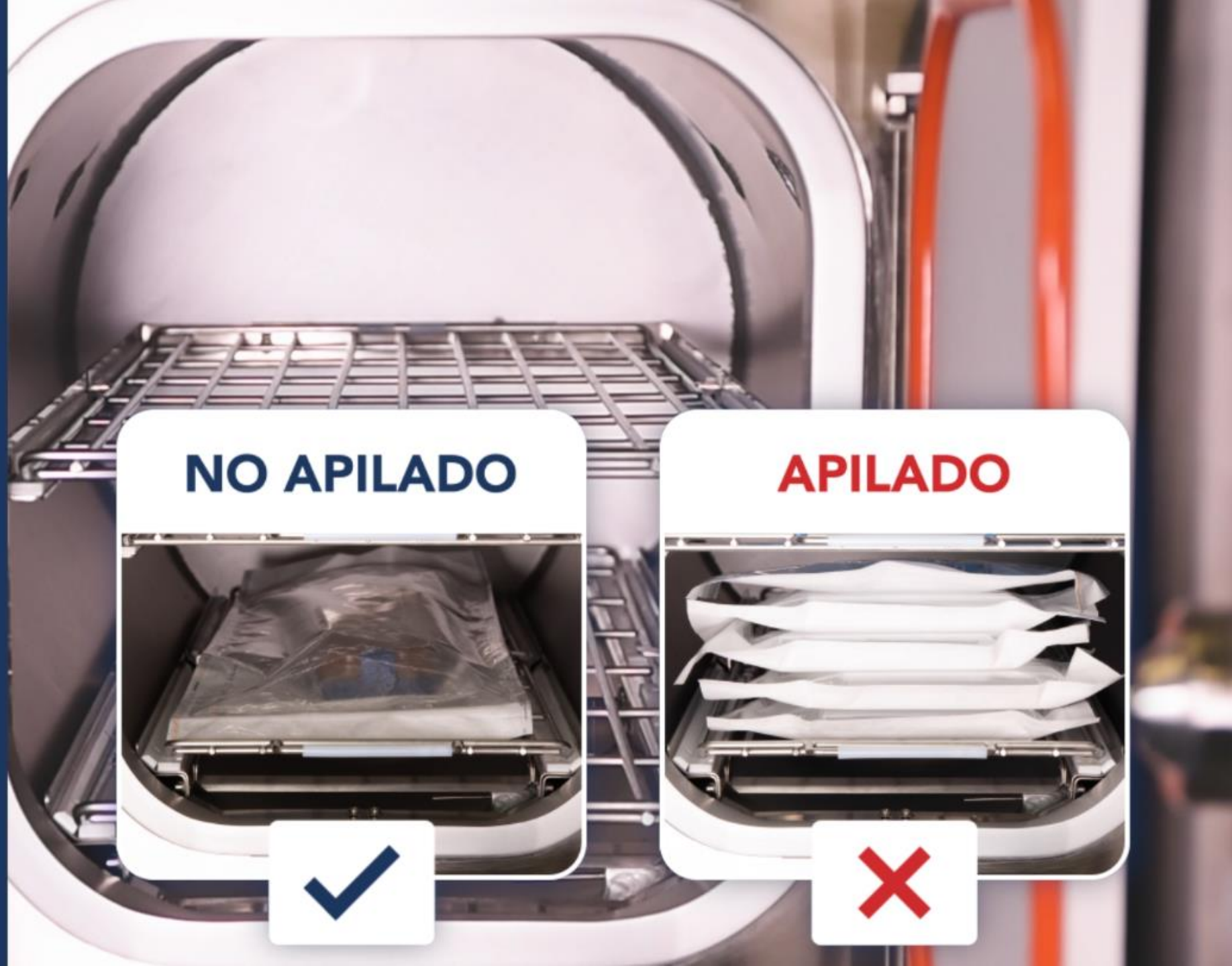


2

Cargar el esterilizador

2.4 CARGA MIXTA

- Cuando las bolsas no estén en la cesta, no las amontone.
- Paquetes voluminosos se colocan en el estante inferior.

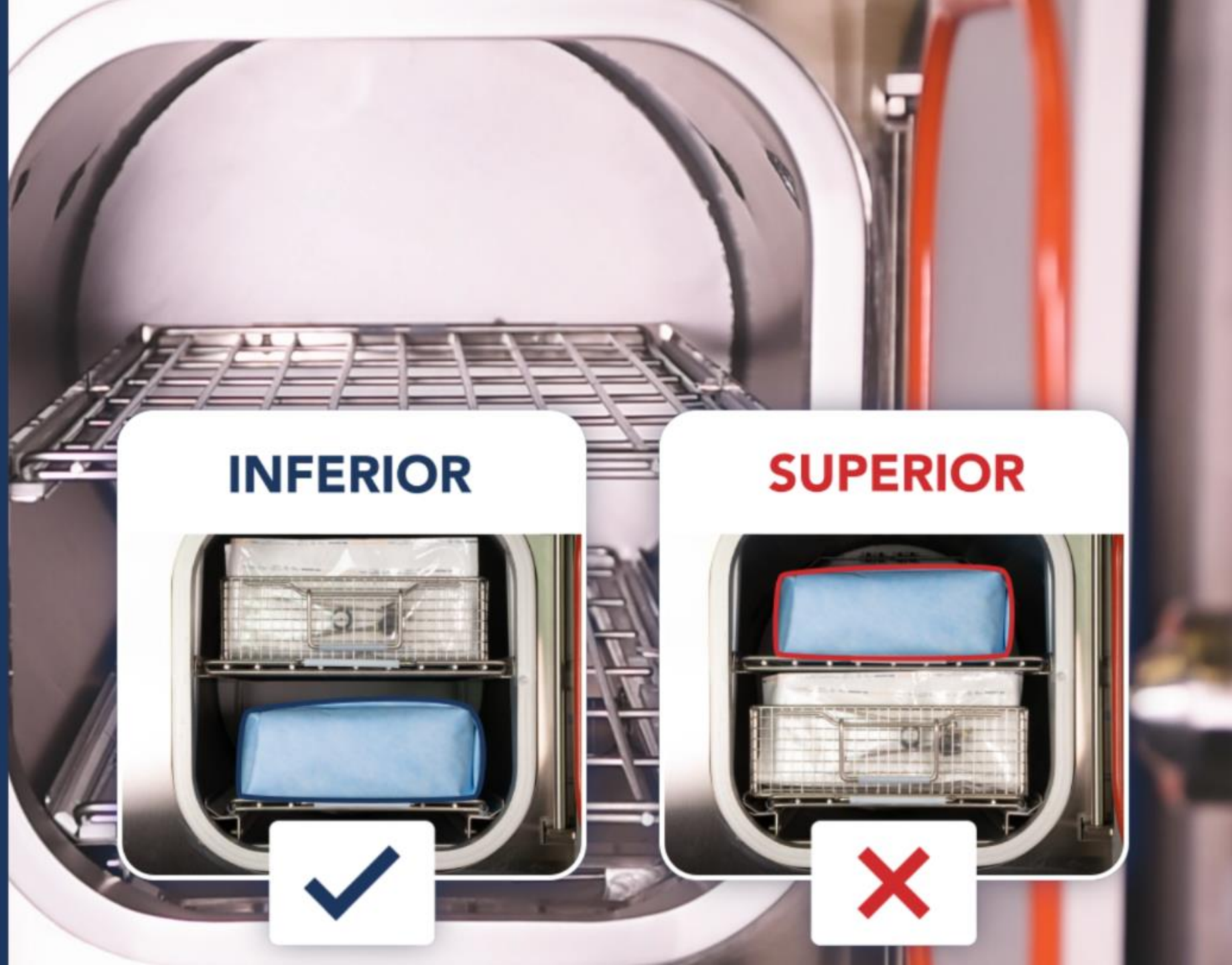

2

Cargar el esterilizador

2.5 PAQUETES VOLUMINOSOS

- Extraiga el estante superior para ganar espacio.
- No apilar los paquetes.




2

Cargar el esterilizador

2.5 PAQUETES VOLUMINOSOS

- Extraiga el estante superior para ganar espacio.
- No apilar los paquetes.

NO APILADO

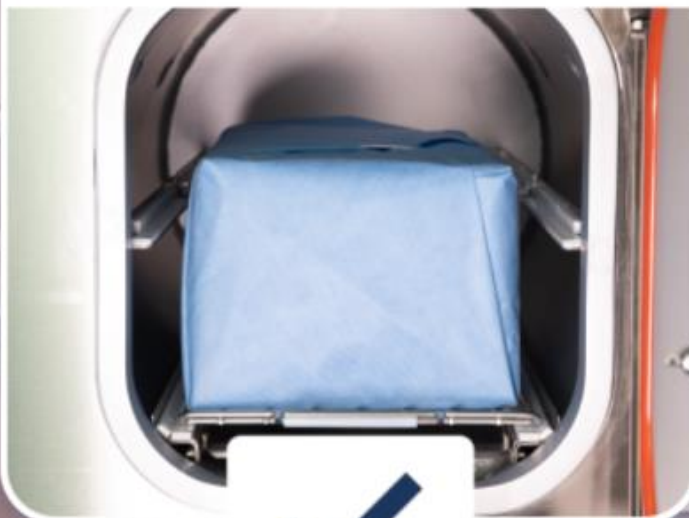

APILADO



2

Cargar el esterilizador

2.6 CIERRA LA PUERTA

- Asegúrese de que la carga no bloquee la puerta.
- Sistema de bloqueo automático de la puerta. No empuje la puerta.



2

Cargar el esterilizador

2.6 CIERRA LA PUERTA

- Asegúrese de que la carga no bloquee la puerta.
- Sistema de bloqueo automático de la puerta. No empuje la puerta.



© **ANTONIO MATACHANA, S.A.** 2020

COPYRIGHT

Reservados todos los derechos. Este contenido es propiedad intelectual de Antonio Matachana, S.A. Queda rigurosamente prohibida la reproducción total o parcial de la información incluida, así como su traducción, copia o manipulación, por cualquier medio o en cualquier tipo de soporte, sin la autorización expresa del titular de los derechos. La utilización no autorizada, así como la lesión de los derechos de propiedad intelectual o Industrial de Antonio Matachana, S.A., dará lugar a las responsabilidades legalmente establecidas.

CONTENIDO

Este es un vídeo promocional. Debido a la constante evolución de nuestros equipos los contenidos incluidos pueden sufrir algún cambio.