



PASSO A PASSO PARA O PROCESSAMENTO

2

Carregando
o esterilizador



2

Carregando o esterilizador

2.1 INÍCIO E PRÉ-AQUECIMENTO

- Toque no display para desativar o modo de espera.
- Feche a porta para acelerar o processo de pré-aquecimento.

●●● matachana



2

Carregando o esterilizador

2.1 INÍCIO E PRÉ-AQUECIMENTO

- Toque no display para desativar o modo de espera.
- Feche a porta para acelerar o processo de pré-aquecimento.



2

Carregando o esterilizador

2.2 CARREGAMENTO DE PACOTES

- Utilize os cestos para posicionar os pacotes.
- Evite dobras e rugas.
- O lado plástico deve facear o lado de TYVEK®.
- Coloque os pacotes em posições verticais.
- Não empilhe os pacotes.



2

Carregando o esterilizador

2.2 CARREGAMENTO DE PACOTES

- Utilize os cestos para posicionar os pacotes.
- Evite dobras e rugas.
- O lado plástico deve facear o lado de TYVEK®.
- Coloque os pacotes em posições verticais.
- Não empilhe os pacotes.



SEM DOBRAS



COM DOBRAS



2

Carregando o esterilizador

2.2 CARREGAMENTO DE PACOTES

- Utilize os cestos para posicionar os pacotes.
- Evite dobras e rugas.
- O lado plástico deve facear o lado de TYVEK®.
- Coloque os pacotes em posições verticais.
- Não empilhe os pacotes.

TYVEK® - PLÁSTICO



PLÁSTICO - PLÁSTICO



2

Carregando o esterilizador

2.2 CARREGAMENTO DE PACOTES

- Utilize os cestos para posicionar os pacotes.
- Evite dobras e rugas.
- O lado plástico deve facear o lado de TYVEK®.
- Coloque os pacotes em posições verticais.
- Não empilhe os pacotes.



2

Carregando o esterilizador

2.2 CARREGAMENTO DE PACOTES

- Utilize os cestos para posicionar os pacotes.
- Evite dobras e rugas.
- O lado plástico deve facear o lado de TYVEK®.
- Coloque os pacotes em posições verticais.
- Não empilhe os pacotes.

NÃO EMPILHADOS



EMPILHADOS



2

Carregando o esterilizador

2.2 CARREGAMENTO DE PACOTES

- Puxe as prateleiras para maior conforto.
- Os pacotes não podem tocar as paredes da câmara.
- Mantenha as saídas de H_2O_2 livres.
- Os pacotes não podem bloquear a abertura do sistema de vácuo.



2

Carregando o esterilizador

2.2 CARREGAMENTO DE PACOTES

- Puxe as prateleiras para maior conforto.
- Os pacotes não podem tocar as paredes da câmara.
- Mantenha as saídas de H_2O_2 livres.
- Os pacotes não podem bloquear a abertura do sistema de vácuo.



2

Carregando o esterilizador

2.2 CARREGAMENTO DE PACOTES

- Puxe as prateleiras para maior conforto.
- Os pacotes não podem tocar as paredes da câmara.
- Mantenha as saídas de H_2O_2 livres.
- Os pacotes não podem bloquear a abertura do sistema de vácuo.




2

Carregando o esterilizador

2.2 CARREGAMENTO DE PACOTES

- Puxe as prateleiras para maior conforto.
- Os pacotes não podem tocar as paredes da câmara.
- Mantenha as saídas de H_2O_2 livres.
- Os pacotes não podem bloquear a abertura do sistema de vácuo.

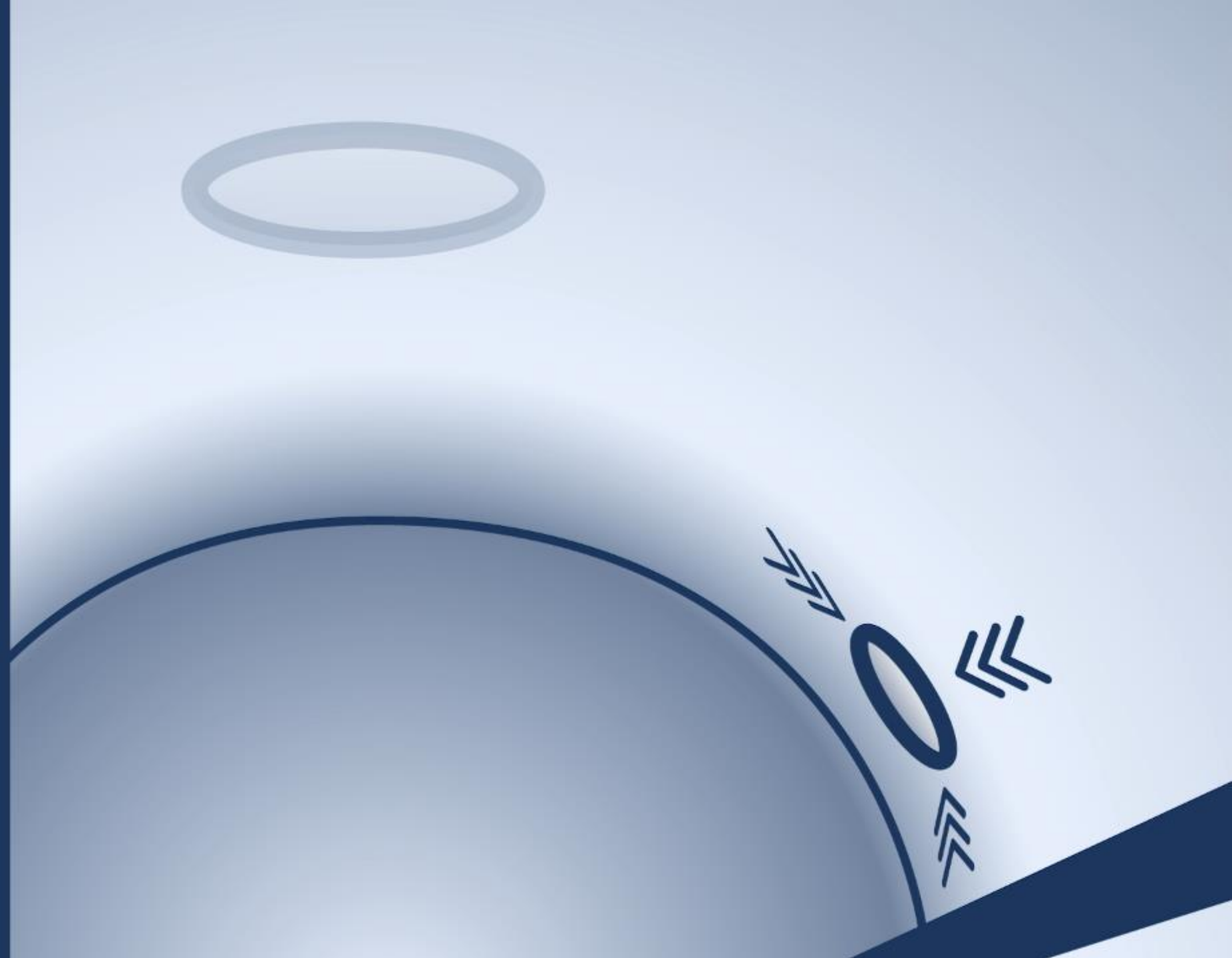

2

Carregando o esterilizador

2.3 CARREGAMENTO DE CAIXAS

- Caixas menores na posição superior.
- Caixas mais volumosas na posição inferior.



2

Carregando o esterilizador

2.3 CARREGAMENTO DE CAIXAS

- Caixas menores na posição superior.
- Caixas mais volumosas na posição inferior.



2

Carregando o esterilizador

2.4 CARGAS MISTAS

- Não empilhar os pacotes quando estes não estiverem em cestos.
- Caixas volumosas posicionadas na posição inferior.



2

Carregando o esterilizador

2.4 CARGAS MISTAS

- Não empilhar os pacotes quando estes não estiverem em cestos.
- Caixas volumosas posicionadas na posição inferior.



2

Carregando o esterilizador

2.5 CAIXAS GRANDES

- Remova a prateleira superior para obter mais espaço.
- Não empilhe as caixas.




2

Carregando o esterilizador

2.5 CAIXAS GRANDES

- Remova a prateleira superior para obter mais espaço.
- Não empilhe as caixas.

NÃO EMPILHADOS

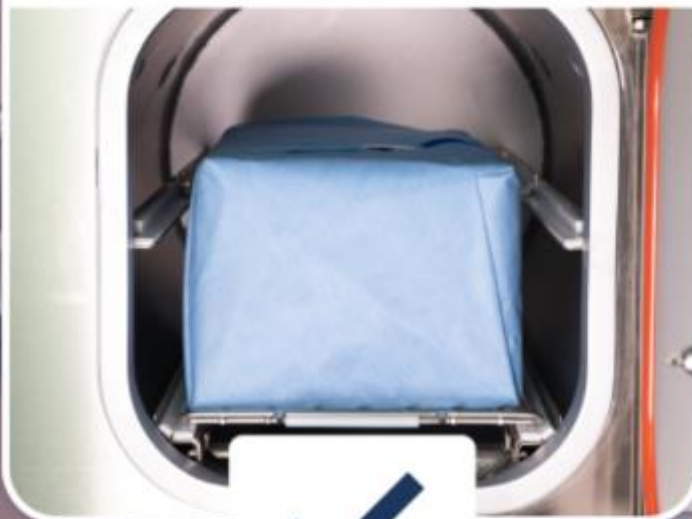

EMPILHADOS



2

Carregando o esterilizador

2.6 FECHER A PORTA

- Assegure que a caixa não esteja bloqueando a porta.
- O sistema de trava de porta é automático. Não empurre a porta.



2

Carregando o esterilizador

2.6 FECHER A PORTA

- Assegure que a caixa não esteja bloqueando a porta.
- O sistema de trava de porta é automático. Não empurre a porta.



© **ANTONIO MATACHANA, S.A.** 2020

DIREITOS AUTORAIS

Todos os direitos reservados. Este conteúdo é de propriedade intelectual de Antonio Matachana, S.A. A reprodução total ou parcial das informações é estritamente proibida, assim como sua tradução, cópia ou manipulação por qualquer meio ou em qualquer formato de mídia sem a autorização expressa do proprietário dos direitos. O uso não autorizado e qualquer violação dos direitos de propriedade intelectual ou industrial de Antonio Matachana, S.A. resultarão em uma ação legal.

CONTEÚDO

Este é um vídeo promocional. Devido à constante evolução de nossos equipamentos, o conteúdo deste documento pode sofrer algumas alterações.