

этапы

обработки

2

Загрузка в
стерилизатор >

2

Загрузка в стерилизатор

2.1 ЗАПУСК И ПРЕДПРОГРЕВ

- Нажмите на дисплей стерилизатора, чтобы вывести его из режима ожидания.
- Закройте дверь для ускорения процесса предпрогрева.

●●● matachana



2

Загрузка в стерилизатор

2.1 ЗАПУСК И ПРЕДПРОГРЕВ

- Нажмите на дисплей стерилизатора, чтобы вывести его из режима ожидания.
- Закройте дверь для ускорения процесса предпрогрева.



2

Загрузка в стерилизатор

2.2 ЗАГРУЗКА ПАКЕТОВ

- Поместите пакеты с изделиями в лотки.
- Избегайте складок и заломов.
- Укладывайте пакеты пленкой к стороне из материала TYVEK®.
- Укладывайте пакеты вертикально.
- Не укладывайте пакеты друг на друга.



2

Загрузка в стерилизатор

2.2 ЗАГРУЗКА ПАКЕТОВ

- Поместите пакеты с изделиями в лотки.
- Избегайте складок и заломов.
- Укладывайте пакеты пленкой к стороне из материала TYVEK®.
- Укладывайте пакеты вертикально.
- Не укладывайте пакеты друг на друга.



БЕЗ СКЛАДОК



СО СКЛАДКАМИ




2

Загрузка в стерилизатор

2.2 ЗАГРУЗКА ПАКЕТОВ

- Поместите пакеты с изделиями в лотки.
- Избегайте складок и заломов.
- Укладывайте пакеты пленкой к стороне из материала TYVEK®.
- Укладывайте пакеты вертикально.
- Не укладывайте пакеты друг на друга.

TYVEK® К ПЛЕНКЕ

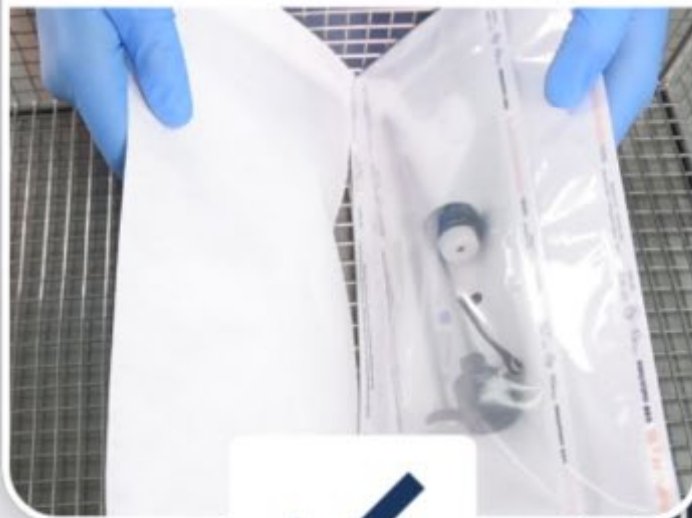

ПЛЕНКА К ПЛЕНКЕ



2

Загрузка в стерилизатор

2.2 ЗАГРУЗКА ПАКЕТОВ

- Поместите пакеты с изделиями в лотки.
- Избегайте складок и заломов.
- Укладывайте пакеты пленкой к стороне из материала TYVEK®.
- Укладывайте пакеты вертикально.
- Не укладывайте пакеты друг на друга.



2

Загрузка в стерилизатор

2.2 ЗАГРУЗКА ПАКЕТОВ

- Поместите пакеты с изделиями в лотки.
- Избегайте складок и заломов.
- Укладывайте пакеты пленкой к стороне из материала TYVEK®.
- Укладывайте пакеты вертикально.
- Не укладывайте пакеты друг на друга.

**АККУРАТНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ**



ДРУГ НА ДРУГА



2

Загрузка в стерилизатор

2.2 ЗАГРУЗКА ПАКЕТОВ

- Для удобства извлеките полку из камеры.
- Пакеты не должны касаться стенок камеры.
- Не закрывайте отверстие подачи H_2O_2 .
- Не закрывайте пакетами отверстие для вакуума.



2

Загрузка в стерилизатор

2.2 ЗАГРУЗКА ПАКЕТОВ

- Для удобства извлеките полку из камеры.
- Пакеты не должны касаться стенок камеры.
- Не закрывайте отверстие подачи H_2O_2 .
- Не закрывайте пакетами отверстие для вакуума.



2

Загрузка в стерилизатор

2.2 ЗАГРУЗКА ПАКЕТОВ

- Для удобства извлеките полку из камеры.
- Пакеты не должны касаться стенок камеры.
- Не закрывайте отверстие подачи H_2O_2 .
- Не закрывайте пакетами отверстие для вакуума.



2

Загрузка в стерилизатор

2.2 ЗАГРУЗКА ПАКЕТОВ

- Для удобства извлеките полку из камеры.
- Пакеты не должны касаться стенок камеры.
- Не закрывайте отверстие подачи H_2O_2 .
- Не закрывайте пакетами отверстие для вакуума.



2

Загрузка в стерилизатор

2.3 ЗАГРУЗКА ПАКЕТОВ

- Небольшие пакеты загружайте на верхнюю полку.
- Более крупные пакеты загружайте на нижнюю полку.



2

Загрузка в стерилизатор

2.3 ЗАГРУЗКА ПАКЕТОВ

- Небольшие пакеты загружайте на верхнюю полку.
- Более крупные пакеты загружайте на нижнюю полку.



2

Загрузка в стерилизатор

2.4 СМЕШАННАЯ ЗАГРУЗКА

- Если пакеты не уложены в корзину, не складывайте их друг на друга.
- Более крупные пакеты загружайте на нижнюю полку.



2

Загрузка в стерилизатор

2.4 СМЕШАННАЯ ЗАГРУЗКА

- Если пакеты не уложены в корзину, не складывайте их друг на друга.
- Более крупные пакеты загружайте на нижнюю полку.

**НА НИЖНЕМ
УРОВНЕ**



**НА ВЕРХНЕМ
УРОВНЕ**



2

Загрузка в стерилизатор

2.5 БОЛЬШИЕ УПАКОВКИ

- Снимите верхнюю полку, чтобы освободить пространство.
- Не укладывайте крупные пакеты друг на друга.



2

Загрузка в стерилизатор

2.5 БОЛЬШИЕ УПАКОВКИ

- Снимите верхнюю полку, чтобы освободить пространство.
- Не укладывайте крупные пакеты друг на друга.

**СВОБОДНАЯ
ЗАГРУЗКА**



ДРУГ НА ДРУГА



2

Загрузка в стерилизатор

2.6 ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРИ

- Убедитесь, что загруженные изделия не блокируют дверь.
- Стерилизатор имеет автоматическую систему блокировки двери. Не закрывайте с усилием.




2

Загрузка в стерилизатор

2.6 ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРИ

- Убедитесь, что загруженные изделия не блокируют дверь.
- Стерилизатор имеет автоматическую систему блокировки двери. Не закрывайте с усилием.

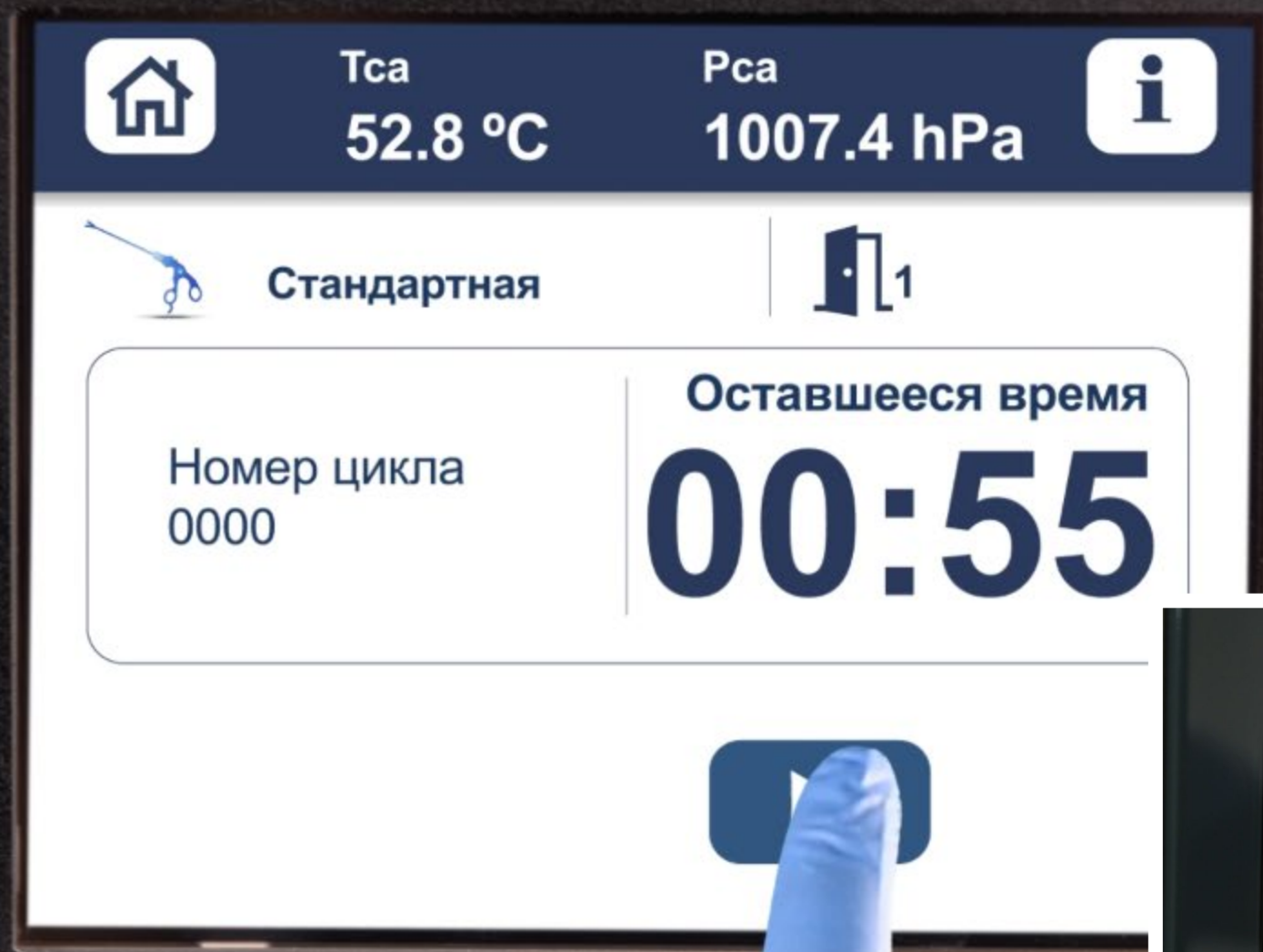

© ANTONIO MATACHANA, S.A. 2021

АВТОРСКОЕ ПРАВО

Все права защищены. Компания **Antonio Matachana, S.A.** оставляет за собой право интеллектуальной собственности на данные материалы. Запрещено использование и копирование какой-либо части без разрешения законного представителя, в том числе перевод, воспроизведение и изменение использованием любых средств или поддержки. Незаконное использование информации, содержащейся в документе, а так же нарушение промышленной и интеллектуальной собственности компании **Antonio Matachana, S.A.** влечет за собой преследование согласно действующего законодательства.

СОДЕРЖАНИЕ

Это рекламное видео. Ввиду постоянного совершенствования нашего оборудования, содержимое данного видео может меняться.