

# ETAPAS DEL REPROCESAMIENTO

3

Ejecutar  
un ciclo



3

Ejecutar un ciclo

3.1

SELECCIÓN DE PROGRAMA

-  RAPID  
Rapid
-  ADVANCED  
Advanced
-  STANDARD  
Standard





●●● matachana

Tca  
52.8 °C

Pca  
1004.7 hPa



BluKat:  18 ciclos

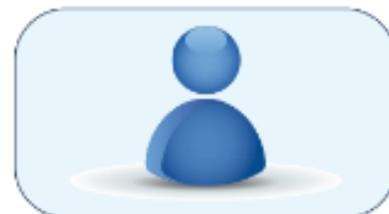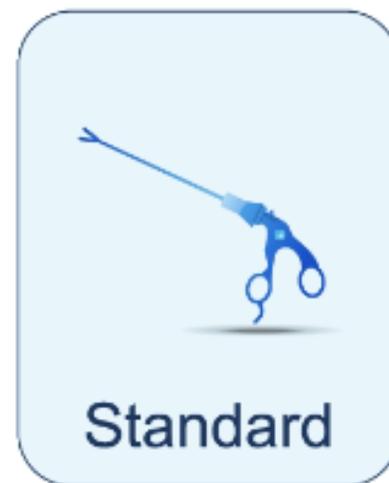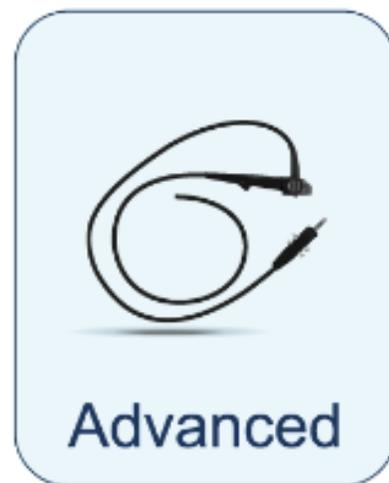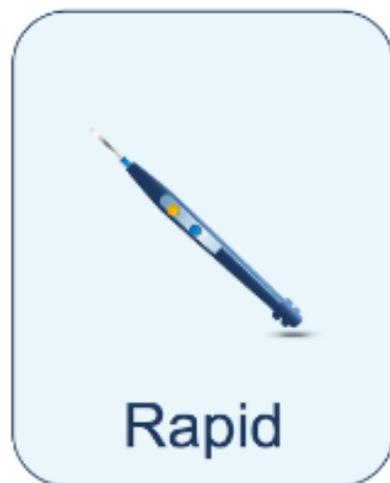

# 3

## Ejecutar un ciclo

### 3.2 INICIAR UN CICLO

- Recuerde cerrar la puerta.
- Espere unos 5 minutos hasta que la cámara se caliente.
- Pulse el botón del "programa" deseado.
- Presione el botón "play".



3

Ejecutar  
un ciclo

3.2 INICIAR  
UN CICLO

- Recuerde cerrar la puerta.
- Espere unos 5 minutos hasta que la cámara se caliente.
- Pulse el botón del "programa" deseado.
- Presione el botón "play".



Tca  
52.8 °C

Pca  
1007.4 hPa



Standard



**Esperando temperatura**

3

Ejecutar un ciclo

3.2 INICIAR UN CICLO

- Recuerde cerrar la puerta.
- Espere unos 5 minutos hasta que la cámara se caliente.
- Pulse el botón del "programa" deseado.
- Presione el botón "play".

●●● matachana

Tca  
52.8 °C

Pca  
1007.4 hPa



BluKat:  18 ciclos



3

Ejecutar  
un ciclo

3.2

INICIAR  
UN CICLO

- Recuerde cerrar la puerta.
- Espere unos 5 minutos hasta que la cámara se caliente.
- Pulse el botón del "programa" deseado.
- Presione el botón "play".

●●● matachana



Tca  
52.8 °C

Pca  
1007.4 hPa



Standard



Ciclo #  
000

Tiempo restante

00:55



**3****Ejecutar  
un ciclo****3.2 INICIAR  
UN CICLO**

- Confirme el tipo de carga en cámara pulsando el botón "OK".
- El esterilizador bloqueará automáticamente la puerta.
- El ciclo se inicia.

**Tca  
52.8 °C****Pca  
1007.4 hPa****POR FAVOR, COMPRUEBE LA CARGA:**

Esterilización de instrumental y/o de endoscopios rígidos.

Carga máxima: 9,5 kg o 20 lúmenes rígidos.  
Ver manual de usuario para más información.



3

## Ejecutar un ciclo

### 3.2 INICIAR UN CICLO

- Confirme el tipo de carga en cámara pulsando el botón "OK".
- El esterilizador bloqueará automáticamente la puerta.
- El ciclo se inicia.

**3****Ejecutar  
un ciclo**


3.2

**INICIAR  
UN CICLO**

- Confirme el tipo de carga en cámara pulsando el botón "OK".
- El esterilizador bloqueará automáticamente la puerta.
- El ciclo se inicia.

**Tca**  
**52.8 °C****Pca**  
**1007.4 hPa****Standard****PROCESO  
EN MARCHA**

Tiempo restante

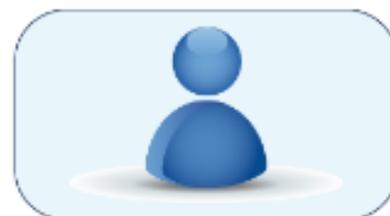**00:50**

**3****Ejecutar  
un ciclo**


3.3

**DETENER  
UN CICLO**

- Haga clic en el botón STOP para cancelar el ciclo.
- El tiempo de recuperación dependerá de la fase del ciclo en la que se haya detenido.
- Siga las instrucciones de la pantalla para confirmar los avisos y abrir la puerta.

**●●● matachana****Tca  
52.8 °C****Pca  
1007.4 hPa****Standard****PROCESO  
EN MARCHA**

Tiempo restante

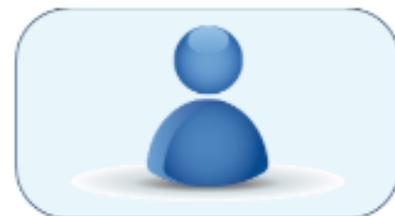**00:10**

**3****Ejecutar  
un ciclo**

3.3

**DETENER  
UN CICLO**

- Haga clic en el botón STOP para cancelar el ciclo.
- El tiempo de recuperación dependerá de la fase del ciclo en la que se haya detenido.
- Siga las instrucciones de la pantalla para confirmar los avisos y abrir la puerta.

**Tca  
52.8 °C****Pca  
1007.4 hPa****Standard****PROCESO EN MARCHA****¿Anular  
el programa?**

**3****Ejecutar  
un ciclo****3.3 DETENER  
UN CICLO**

- Haga clic en el botón STOP para cancelar el ciclo.
- El tiempo de recuperación dependerá de la fase del ciclo en la que se haya detenido.
- Siga las instrucciones de la pantalla para confirmar los avisos y abrir la puerta.

**Tca  
52.8 °C****Pca  
1007.4 hPa****2****PROCESO PARADO****W23 Ciclo abortado por  
el usuario****Nota: Para confirmar,  
pulsar en el mensaje**

1

Tca 52.8 °C Pca 1007.4 hPa

2

PROCESO PARADO

**W23 Ciclo abortado por el usuario**

Nota: Para confirmar, pulsar en el mensaje



2

Tca 52.8 °C Pca 1007.4 hPa

2

PROCESO PARADO

**W23 Ciclo abortado por el usuario**

Nota: Para confirmar, pulsar en el mensaje



3

Tca 52.8 °C Pca 1007.4 hPa

2

PROCESO PARADO

**W23 Ciclo abortado por el usuario**

Nota: Para confirmar, pulsar en el mensaje



4

Tca 52.8 °C Pca 1007.4 hPa

1

PROCESO PARADO

**W48 Ciclo con incidencias**

Nota: Para confirmar, pulsar en el mensaje



5

Tca 52.8 °C Pca 1007.4 hPa

1

PROCESO PARADO

**W48 Ciclo con incidencias**

Nota: Para confirmar, pulsar en el mensaje



6

Tca 52.8 °C Pca 1007.4 hPa

Standard

1

Ciclo incorrecto

Tiempo finalización 08:10



7 Tca 52.8 °C Pca 1007.4 hPa 



Confirmar ciclo incorrecto

Ciclo con fallo



8 Tca 52.8 °C Pca 1007.4 hPa 



Standard



|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Ciclo incorrecto | Tiempo finalización<br>08:10 |
|------------------|------------------------------|



9  Tca 52.8 °C Pca 1007.4 hPa 



Standard



|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Ciclo #<br>001 | Tiempo restante<br><b>00:55</b> |
|----------------|---------------------------------|



**3****Ejecutar  
un ciclo****3.4 FINALIZAR  
UN CICLO**

- El esterilizador indicará cuando el ciclo se haya completado.
- Haga clic en el icono de sonido para detener el tono.
- Haga clic en el icono de abrir puerta.

**●●● matachana****Tca  
52.8 °C****Pca  
1007.4 hPa****Standard****Ciclo  
completado**

Tiempo finalización

**12:55**

**3****Ejecutar  
un ciclo**

3.4

**FINALIZAR  
UN CICLO**

- El esterilizador indicará cuando el ciclo se haya completado.
- Haga clic en el icono de sonido para detener el tono.
- Haga clic en el icono de abrir puerta.

**●●● matachana****Tca  
52.8 °C****Pca  
1007.4 hPa****Standard****Ciclo  
completado**

Tiempo finalización

**12:55**

**3****Ejecutar  
un ciclo**

3.4

**FINALIZAR  
UN CICLO**

- El esterilizador indicará cuando el ciclo se haya completado.
- Haga clic en el icono de sonido para detener el tono.
- Haga clic en el icono de abrir puerta.

**●●● matachana****Tca  
52.8 °C****Pca  
1007.4 hPa****Standard****Ciclo  
completado**

Tiempo finalización

**12:55**

© **ANTONIO MATACHANA, S.A.** 2020

## **COPYRIGHT**

Reservados todos los derechos. Este contenido es propiedad intelectual de Antonio Matachana, S.A. Queda rigurosamente prohibida la reproducción total o parcial de la información incluida, así como su traducción, copia o manipulación, por cualquier medio o en cualquier tipo de soporte, sin la autorización expresa del titular de los derechos. La utilización no autorizada, así como la lesión de los derechos de propiedad intelectual o Industrial de Antonio Matachana, S.A., dará lugar a las responsabilidades legalmente establecidas.

## **CONTENIDO**

Este es un vídeo promocional. Debido a la constante evolución de nuestros equipos los contenidos incluidos pueden sufrir algún cambio.