

ЭТАПЫ

ОБРАБОТКИ

3

Выполнение
цикла



3

Выполнение
цикла




Ткам
52.8 °C

Ркам
1004.7 гПа



3.1

ВЫБОР
ПРОГРАММЫ

-  БЫСТРАЯ
Rapid
-  ИНТЕНСИВНАЯ
Advanced
-  СТАНДАРТНАЯ
Standard

BluKat:  18 цикла



3

Выполнение цикла

3.2 ЗАПУСК ЦИКЛА

- Убедитесь, что дверь закрыта
- Подождите около 5 минут, чтобы камера нагрелась.
- Выберите нужную программу.
- Нажмите кнопку запуска.



3

Выполнение
цикла



Ткам
52.8 °C

Ркам
1007.4 гПа



3.2 ЗАПУСК ЦИКЛА

- Убедитесь, что дверь закрыта
- Подождите около 5 минут, чтобы камера нагрелась.
- Выберите нужную программу.
- Нажмите кнопку запуска.



Стандартная



Идет предпрогрев

3

Выполнение цикла

3.2 ЗАПУСК ЦИКЛА

- Убедитесь, что дверь закрыта
- Подождите около 5 минут, чтобы камера нагрелась.
- Выберите нужную программу.
- Нажмите кнопку запуска.

Ткам
52.8 °C

Ркам
1007.4 гПа



BluKat:  18 циклов



3

Выполнение
цикла



Ткам
52.8 °C

Ркам
1007.4 гПа



3.2 ЗАПУСК ЦИКЛА

- Убедитесь, что дверь закрыта
- Подождите около 5 минут, чтобы камера нагрелась.
- Выберите нужную программу.
- Нажмите кнопку запуска.



Стандартная



Номер цикла
000

Оставшееся время

00:55



3**Выполнение
цикла****3.2 ЗАПУСК ЦИКЛА**

- Подтвердите наличие изделий в камере нажатием кнопки ОК.
- Стерилизатор автоматически заблокирует дверь.
- Начнется цикл.

**Ткам
52.8 °C****Ркам
1007.4 гПа****ПРОВЕРЬТЕ ЗАГРУЗКУ:**

Стерилизация инструментов и/или жестких эндоскопов.

Максимальная загрузка: 9,5 кг или 20 жестких эндоскопов.

См. Руководство по эксплуатации.



3

Выполнение цикла

3.2 ЗАПУСК ЦИКЛА

- Подтвердите наличие изделий в камере нажатием кнопки ОК.
- Стерилизатор автоматически заблокирует дверь.
- Начнется цикл.

3**Выполнение
цикла****3.2 ЗАПУСК ЦИКЛА**

- Подтвердите наличие изделий в камере нажатием кнопки ОК.
- Стерилизатор автоматически заблокирует дверь.
- Начнется цикл.

**Ткам
52.8 °С****Ркам
1007.4 гПа****Стандартная****ВЫПОЛНЯЕТСЯ
ЦИКЛ****Оставшееся время****00:50**

3**Выполнение
цикла**

3.3

**ПРЕРЫВАНИЕ
ЦИКЛА**

- Нажмите кнопку СТОП для остановки и отмены цикла.
- Время восстановления зависит от выполняемой фазы цикла, на которой он был остановлен.
- Следуйте инструкциям на дисплее, чтобы подтвердить предупредительные сообщения и открыть дверь.

**Ткам
52.8 °С****Ркам
1007.4 гПа****Стандартная****ВЫПОЛНЯЕТСЯ
ЦИКЛ**

Оставшееся время

00:10

3**Выполнение
цикла**

3.3

**ПРЕРЫВАНИЕ
ЦИКЛА**

- Нажмите кнопку СТОП для остановки и отмены цикла.
- Время восстановления зависит от выполняемой фазы цикла, на которой он был остановлен.
- Следуйте инструкциям на дисплее, чтобы подтвердить предупредительные сообщения и открыть дверь.

**Ткам
52.8 °C****Ркам
1007.4 гПа****Стандартная****ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЦИКЛ****Остановить
цикл?**

3**Выполнение
цикла**

3.3

**ПРЕРЫВАНИЕ
ЦИКЛА**

- Нажмите кнопку СТОП для остановки и отмены цикла.
- Время восстановления зависит от выполняемой фазы цикла, на которой он был остановлен.
- Следуйте инструкциям на дисплее, чтобы подтвердить предупредительные сообщения и открыть дверь.

**Ткам
52.8 °С****Ркам
1007.4 гПа****2****ЦИКЛ ОСТАНОВЛЕН****W23 Цикл прерван
оператором****Примечание: коснитесь
сообщения для его
подтверждения**

1

Ткам 52.8 °C Ркам 1007.4 гПа

ЦИКЛ ОСТАНОВЛЕН

W23 Цикл прерван оператором

Примечание: коснитесь сообщения для его подтверждения

2

Ткам 52.8 °C Ркам 1007.4 гПа

ЦИКЛ ОСТАНОВЛЕН

W23 Цикл прерван оператором

Примечание: коснитесь сообщения для его подтверждения

3

Ткам 52.8 °C Ркам 1007.4 гПа

ЦИКЛ ОСТАНОВЛЕН

W23 Цикл прерван оператором

Примечание: коснитесь сообщения для его подтверждения

4

Ткам 52.8 °C Ркам 1007.4 гПа

ЦИКЛ ОСТАНОВЛЕН

W48 Цикл с ошибкой

Примечание: коснитесь сообщения для его подтверждения

5

Ткам 52.8 °C Ркам 1007.4 гПа

ЦИКЛ ОСТАНОВЛЕН

W48 Цикл с ошибкой

Примечание: коснитесь сообщения для его подтверждения

6

Ткам 52.8 °C Ркам 1007.4 гПа

Стандартная

Некорректный цикл

Время завершения 08:10

7

Ткам 52.8 °C Ркам 1007.4 гПа 



Подтвердите, что цикл был с проблемой

Некорректный цикл



8

Ткам 52.8 °C Ркам 1007.4 гПа 



Стандартная




Некорректный цикл

Время завершения

08:10



9

 Ткам 52.8 °C Ркам 1007.4 гПа 



Стандартная



Номер цикла
001

Оставшееся время

00:55



3**Выполнение
цикла**

3.4

**ЗАВЕРШЕНИЕ
ЦИКЛА**

- Стерилизатор сообщит о завершении цикла.
- Нажмите на иконку звука, чтобы остановить подачу звукового сигнала.
- Нажмите на иконку открывания двери.

**Ткам
52.8 °C****Ркам
1007.4 гПа****Стандартная****Цикл
завершен**

Время завершения

12:55

3**Выполнение цикла**

3.4

ЗАВЕРШЕНИЕ ЦИКЛА

- Стерилизатор сообщит о завершении цикла.
- Нажмите на иконку звука, чтобы остановить подачу звукового сигнала.
- Нажмите на иконку открывания двери.

**Ткам
52.8 °C****Ркам
1007.4 гПа****Стандартная****Цикл
завершен****Время завершения****12:55**

3**Выполнение
цикла**

3.4

**ЗАВЕРШЕНИЕ
ЦИКЛА**

- Стерилизатор сообщит о завершении цикла.
- Нажмите на иконку звука, чтобы остановить подачу звукового сигнала.
- Нажмите на иконку открывания двери.

**Ткам
52.8 °C****Ркам
1007.4 гПа****Стандартная****Цикл
завершен****Время завершения****12:55**

© ANTONIO MATACHANA, S.A. 2021

АВТОРСКОЕ ПРАВО

Все права защищены. Компания **Antonio Matachana, S.A.** оставляет за собой право интеллектуальной собственности на данные материалы. Запрещено использование и копирование какой-либо части без разрешения законного представителя, в том числе перевод, воспроизведение и изменение использованием любых средств или поддержки. Незаконное использование информации, содержащейся в документе, а так же нарушение промышленной и интеллектуальной собственности компании **Antonio Matachana, S.A.** влечет за собой преследование согласно действующего законодательства.

СОДЕРЖАНИЕ

Это рекламное видео. Ввиду постоянного совершенствования нашего оборудования, содержимое данного видео может меняться.