

ÉTAPES DU TRAITEMENT

4

Libération
de la charge





4

Libération de la charge

4.1 CONFIRMATION DE LA LIBERATION PARAMETRIQUE

Confirmer que le cycle s'est déroulé correctement, sans erreur ni alarme.

- Pas de codes d'erreur ni d'alarmes à l'écran.
- Pas de codes d'erreur ni d'alarmes sur le tiquet.

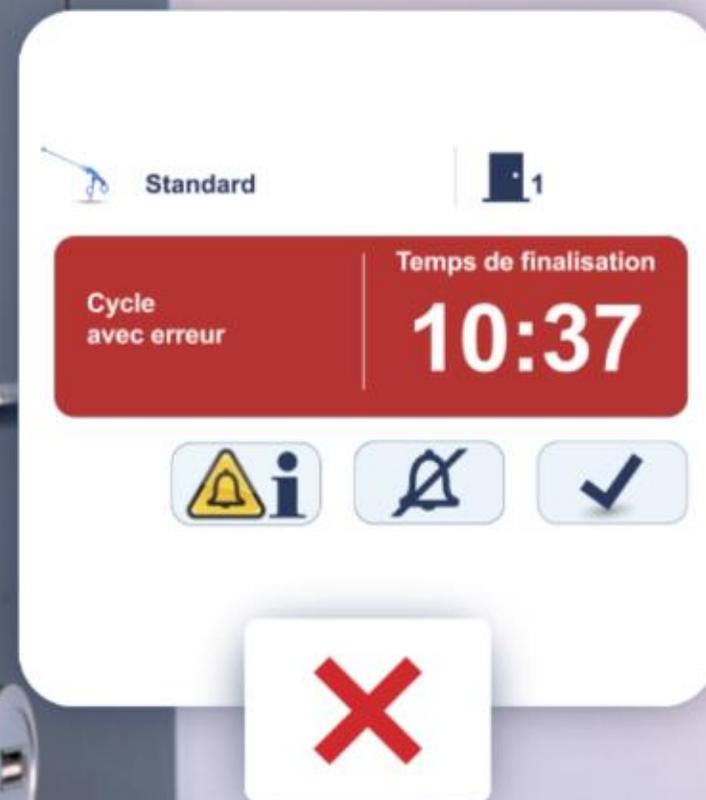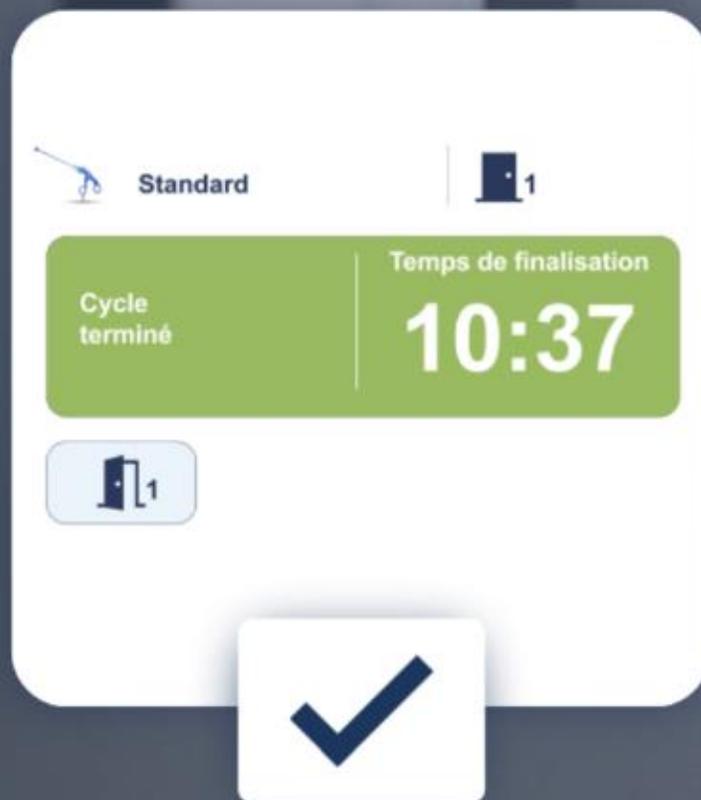

4

Libération
de la charge4.1 CONFIRMATION DE
LA LIBERATION
PARAMETRIQUE

Confirmer que le cycle s'est déroulé correctement, sans erreur ni alarme.

- Pas de codes d'erreur ni d'alarmes à l'écran.
- Pas de codes d'erreur ni d'alarmes sur le ticket.

Start: 08-01-2020 09:55:01
 Cycle duration: 00:40:24
 Ster. Duration: 00:24:24

SANS INCIDENCES

00:00:00 T 55.5°C P 1028.0hPa
 00:40:25 T 55.6°C P 1027.8hPa
 CYCLE END



Start: 09-01-2020 15:55:12
 Cycle duration: 00:17:23
 Ster. Duration: 00:06:19

AVEC INCIDENCES

00:00:00 T 54.2°C P 1023.1hPa
 CYCLE END
 00:24:15 T 55.6°C P 1021.8hPa
 W48 Cycle with fault



4

Libération de la charge

4.2 OUVERTURE DE LA PORTE

- Cliquez sur l'icône de la porte pour la déverrouiller.
- La porte sera automatiquement déverrouillée.
- Portez toujours des gants et ouvrez la porte manuellement.



4

Libération de la charge

4.2 OUVERTURE DE LA PORTE

- Cliquez sur l'icône de la porte pour la déverrouiller.
- La porte sera automatiquement déverrouillée.
- Portez toujours des gants et ouvrez la porte manuellement.



4

Libération de la charge

4.2 OUVERTURE DE LA PORTE

- Cliquez sur l'icône de la porte pour la déverrouiller.
- La porte sera automatiquement déverrouillée.
- Portez toujours des gants et ouvrez la porte manuellement.



4

Libération de la charge

4.3 EXTRAIRE LA CHARGE

- Extraire l'étagère pour plus de confort.
- Placez la charge sur une table pour la vérification.




4

Libération de la charge

4.3 EXTRAIRE LA CHARGE

- Extraire l'étagère pour plus de confort.
- Placez la charge sur une table pour la vérification.

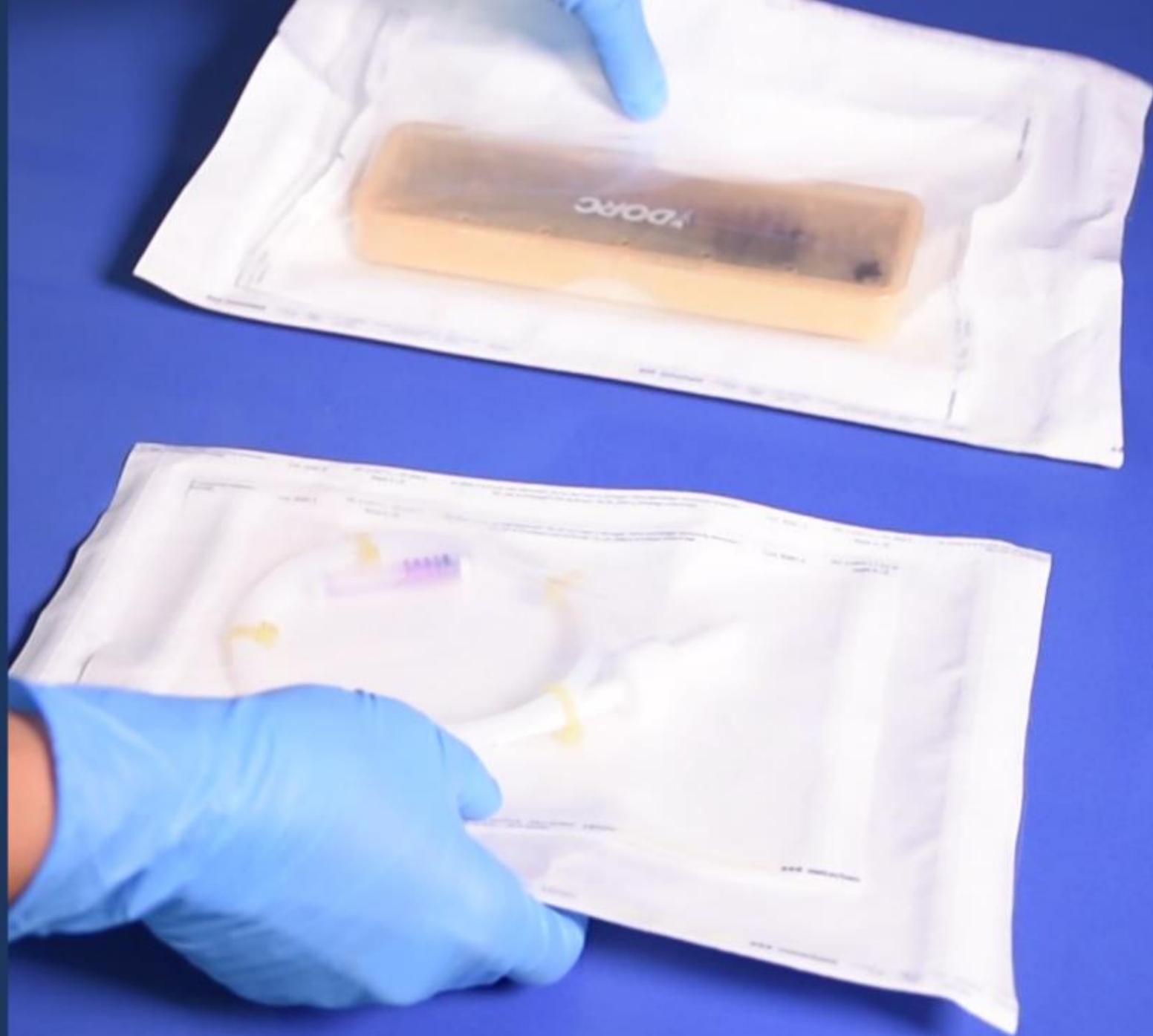

4

Libération de la charge


4.4 CONTRÔLE DES INDICATEURS

- Vérifier l'indicateur de ruban.
- Vérifier l'indicateur des sachets.
- Vérifier l'indicateur à l'intérieur des sachets.
- Vérifier que l'indicateur biologique a été traité.
- Vérifier l'extraction de l'air avec l'indicateur Hélix.

TRAITÉ



NON TRAITÉ

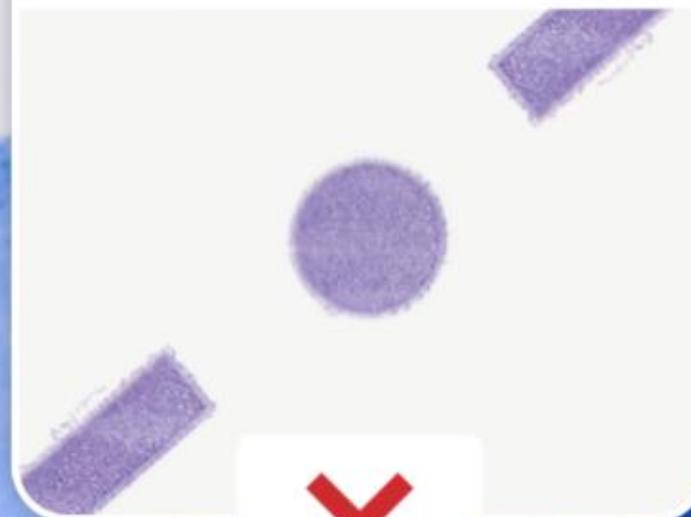

4

Libération de la charge


4.4 CONTRÔLE DES INDICATEURS

- Vérifier l'indicateur de ruban.
- Vérifier l'indicateur des sachets.
- Vérifier l'indicateur à l'intérieur des sachets.
- Vérifier que l'indicateur biologique a été traité.
- Vérifier l'extraction de l'air avec l'indicateur Hélix.

TRAITÉ



NON TRAITÉ

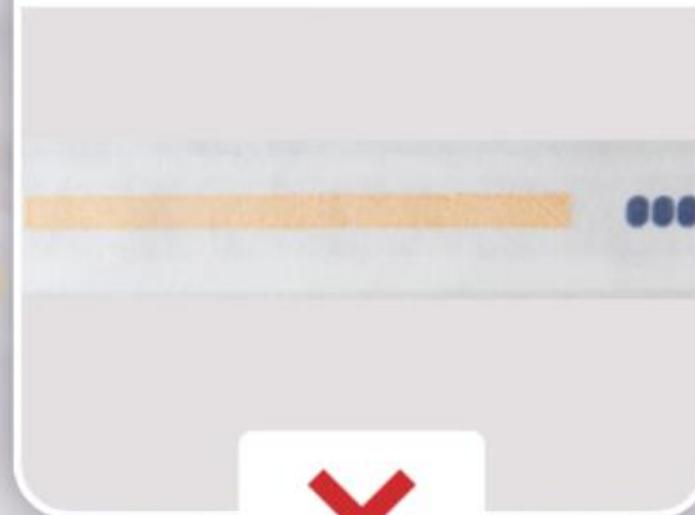


4

Libération de la charge

4.4 CONTRÔLE DES INDICATEURS


- Vérifier l'indicateur de ruban.
- Vérifier l'indicateur des sachets.
- Vérifier l'indicateur à l'intérieur des sachets.
- Vérifier que l'indicateur biologique a été traité.
- Vérifier l'extraction de l'air avec l'indicateur Hélix.

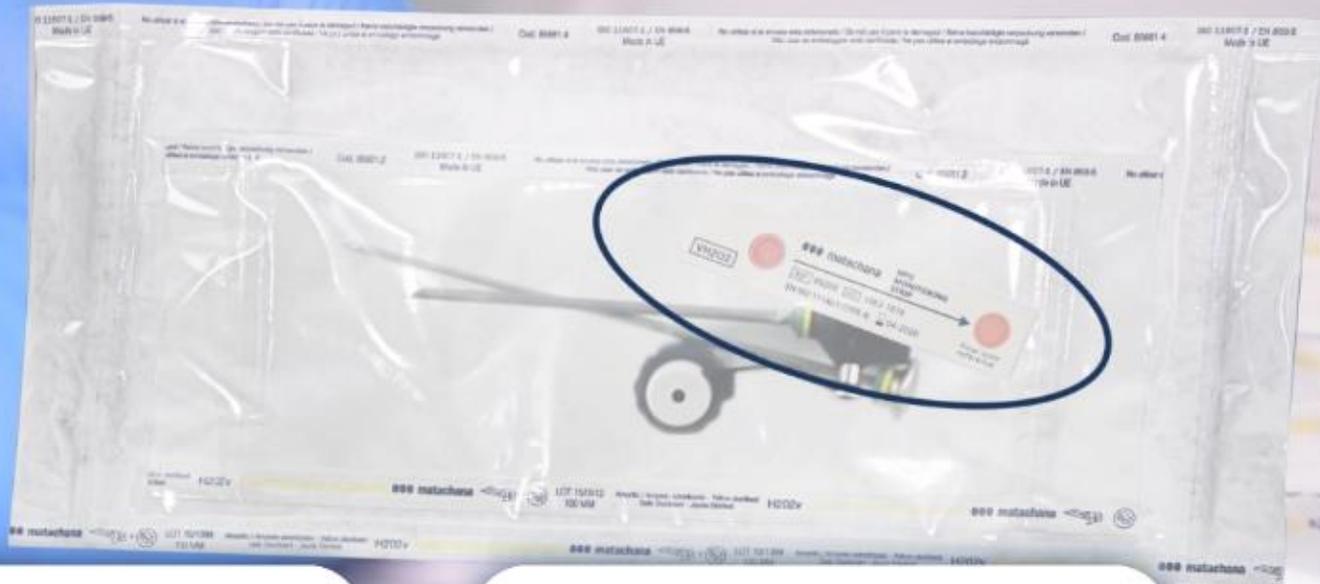

TRAITÉ



NON TRAITÉ

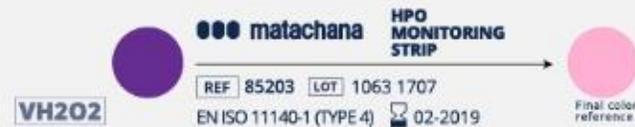

4

Libération
de la charge4.4 CONTRÔLE
DES INDICATEURS

- Vérifier l'indicateur de ruban.
- Vérifier l'indicateur des sachets.
- Vérifier l'indicateur à l'intérieur des sachets.
- Vérifier que l'indicateur biologique a été traité.
- Vérifier l'extraction de l'air avec l'indicateur Hélix.





N'oubliez pas de suivre la procédure d'incubation selon les instructions du Matachana.

TRAITÉ**NON TRAITÉ**

4

Libération
de la charge4.4 CONTRÔLE
DES INDICATEURS

- Vérifier l'indicateur de ruban.
- Vérifier l'indicateur des sachets.
- Vérifier l'indicateur à l'intérieur des sachets.
- Vérifier que l'indicateur biologique a été traité.
- Vérifier l'extraction de l'air avec l'indicateur Hélix.

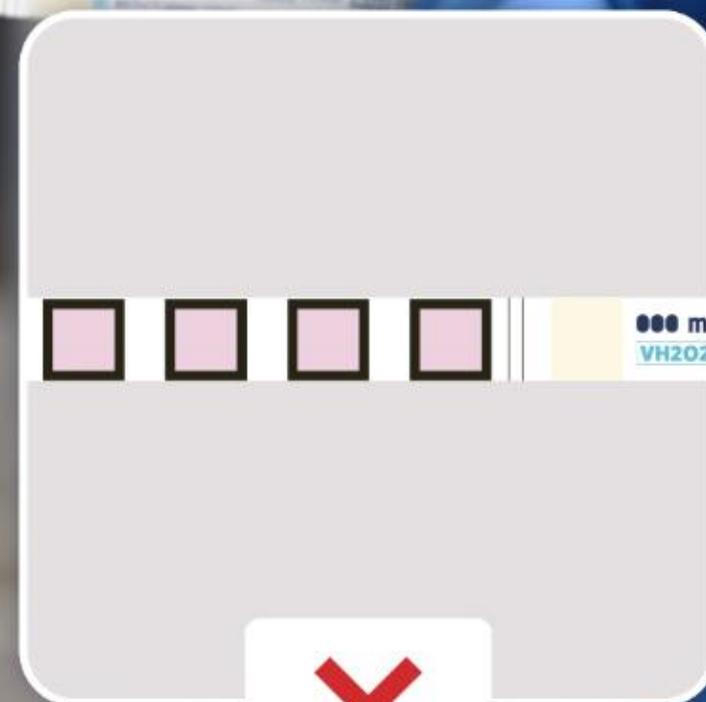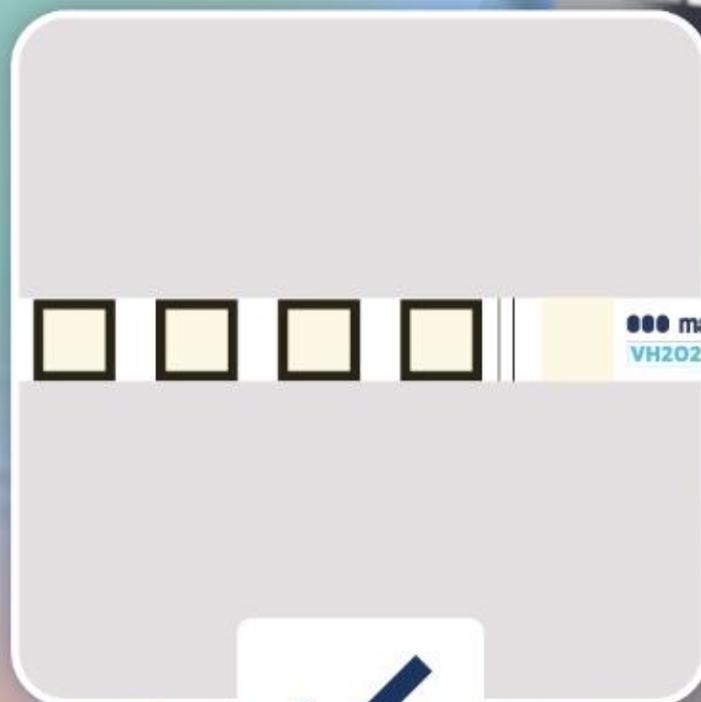

© **ANTONIO MATACHANA, S.A.** 2020

COPYRIGHT

Tous droits réservés. Ce contenu est la propriété intellectuelle de Antonio Matachana, S.A. Toute reproduction totale ou partielle de l'information et sa traduction, copie ou manipulation par tout moyen ou dans tout support sans l'autorisation expresse du propriétaire des droits est formellement interdite. L'utilisation non autorisée et toute violation des droits de propriété intellectuelle ou industrielle de Antonio Matachana, S.A. donnera lieu à une action en justice.

CONTENU

Ceci est une vidéo promotionnelle. En raison de l'évolution constante de nos appareils, les contenus compris dans ce matériel peuvent faire l'objet de modifications.