



PASSO A PASSO PARA O PROCESSAMENTO

4 Liberando a carga >


4

Liberando a carga

4.1 CONFIRMANDO A LIBERAÇÃO PARAMÉTRICA

Confirme se o ciclo foi concluído com sucesso, sem erros ou alarmes.

- Sem códigos de erro ou alarmes no display.
- Sem códigos de erro ou alarmes no registro impresso.

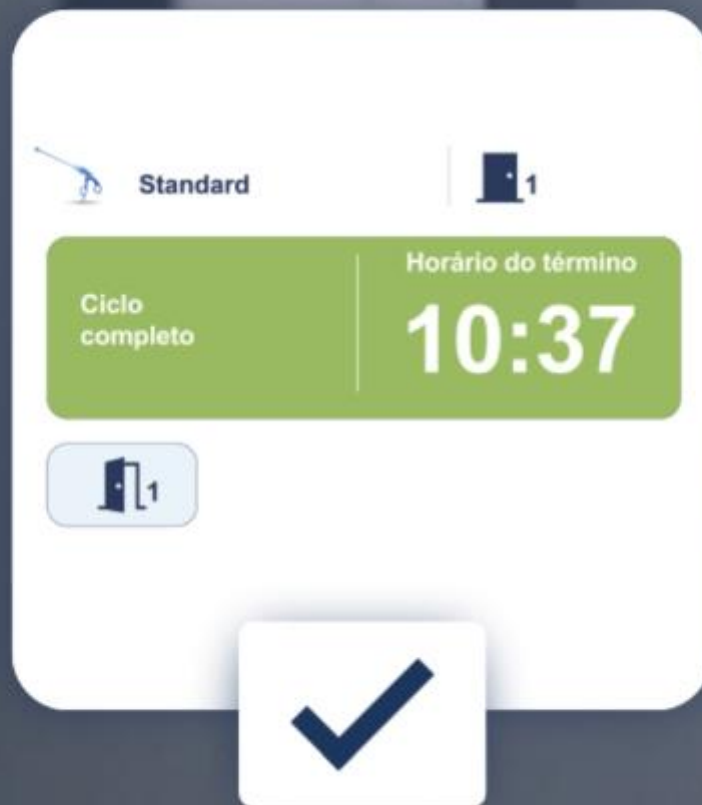

4

Liberando
a carga4.1 CONFIRMANDO
A LIBERAÇÃO
PARAMÉTRICA

Confirme se o ciclo foi concluído com sucesso, sem erros ou alarmes.

- Sem códigos de erro ou alarmes no display.
- Sem códigos de erro ou alarmes no registro impresso.

Start: 08-01-2020 09:55:01
Cycle duration: 00:40:24
Ster. Duration: 00:24:24

SEM INCIDÊNCIAS

00:00:00 T 55.5°C P 1028.0hPa
00:40:25 T 55.6°C P 1027.8hPa
CYCLE END



Start: 09-01-2020 15:55:12
Cycle duration: 00:17:23
Ster. Duration: 00:06:19

COM INCIDÊNCIAS

00:00:00 T 54.2°C P 1023.1hPa
CYCLE END
00:24:15 T 55.6°C P 1021.8hPa
W48 Cycle with fault



4

Liberando a carga

4.2 ABRINDO A PORTA

- Clique no ícone da porta para abrir a porta.
- A porta se abrirá automaticamente.
- Sempre utilize luvas e abra a porta manualmente.



4

Liberando a carga

4.2 ABRINDO A PORTA

- Clique no ícone da porta para abrir a porta.
- A porta se abrirá automaticamente.
- Sempre utilize luvas e abra a porta manualmente.

4

Liberando a carga

4.2 ABRINDO A PORTA

- Clique no ícone da porta para abrir a porta.
- A porta se abrirá automaticamente.
- Sempre utilize luvas e abra a porta manualmente.



4

Liberando a carga

4.3 REMOVENDO A CARGA

- Puxe a prateleira para maior conforto.
- Coloque a carga em uma mesa para inspeção.




4

Liberando a carga

4.3 REMOVENDO A CARGA

- Puxe a prateleira para maior conforto.
- Coloque a carga em uma mesa para inspeção.

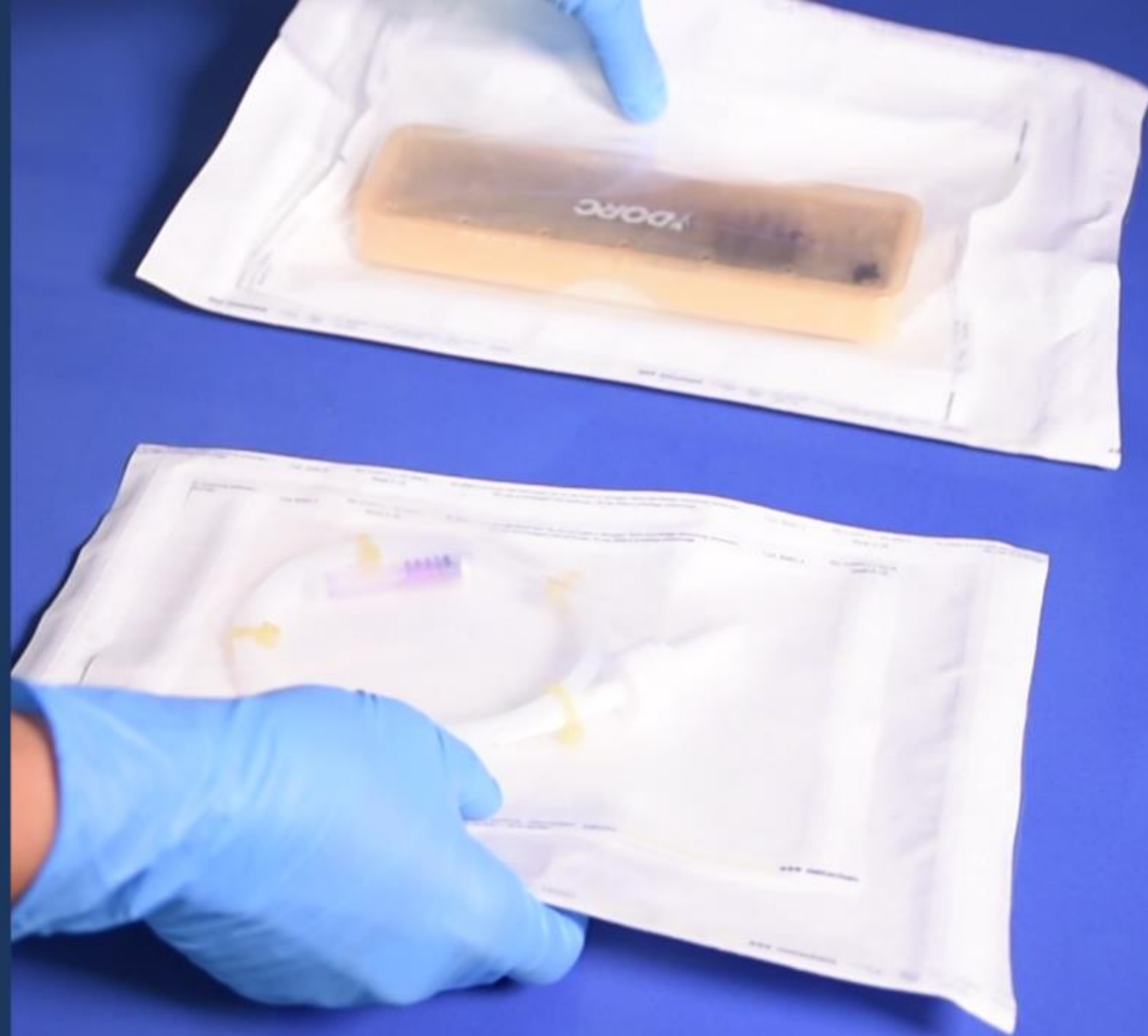

4

Liberando a carga


4.4 CHECANDO OS INDICADORES

- Confirme o indicador da fita.
- Confirme o indicador da embalagem.
- Confirme o indicador interior à embalagem.
- Confirme se o IB foi processado.
- Confirme a extração de ar com o indicador Hélix.

PROCESSADO



NÃO PROCESSADO

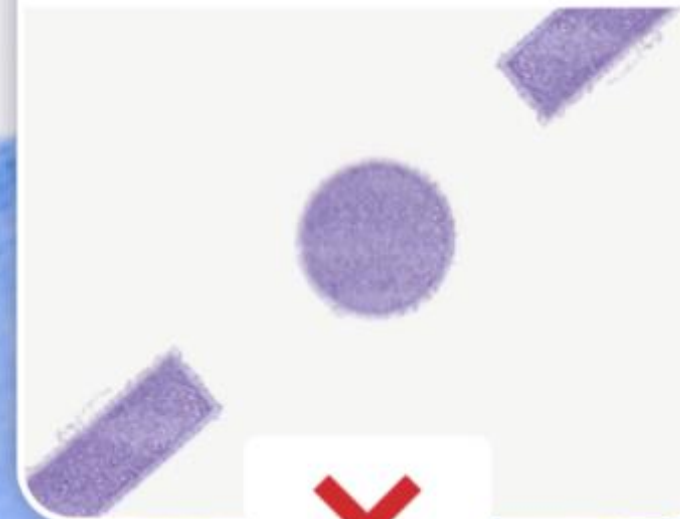

4

Liberando a carga


4.4 CHECANDO OS INDICADORES

- Confirme o indicador da fita.
- Confirme o indicador da embalagem.
- Confirme o indicador interior à embalagem.
- Confirme se o IB foi processado.
- Confirme a extração de ar com o indicador Hélix.

PROCESSADO



NÃO PROCESSADO

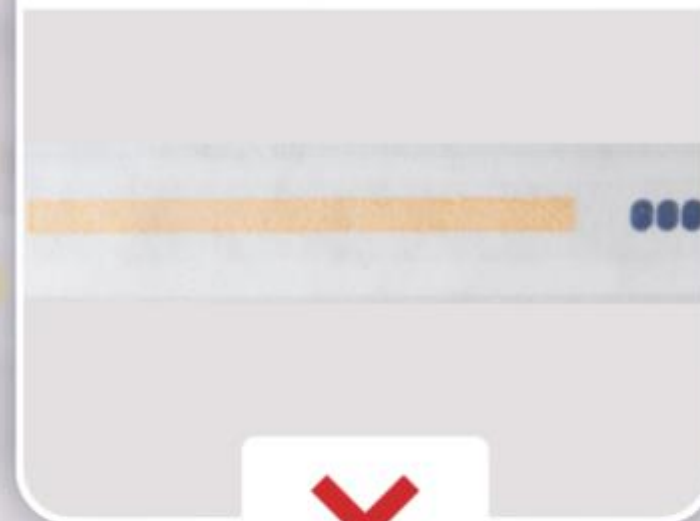

4


Liberando a carga

4.4 CHECANDO OS INDICADORES


- Confirme o indicador da fita.
- Confirme o indicador da embalagem.
- Confirme o indicador interior à embalagem.
- Confirme se o IB foi processado.
- Confirme a extração de ar com o indicador Hélix.



PROCESSADO

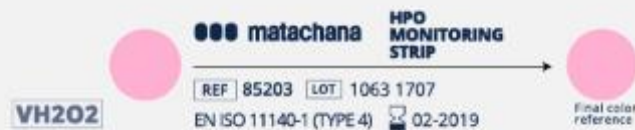

NÃO PROCESSADO

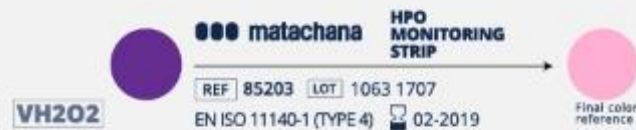

4

Liberando a carga

4.4 CHECANDO OS INDICADORES

- Confirme o indicador da fita.
- Confirme o indicador da embalagem.
- Confirme o indicador interior à embalagem.
- Confirme se o IB foi processado.
- Confirme a extração de ar com o indicador Hélix.



LEMBRE-SE DE SEGUIR OS PROCEDIMENTOS DE INCUBAÇÃO DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DA MATACHANA.

PROCESSADO



NÃO PROCESSADO





4

Liberando a carga

4.4 CHECANDO OS INDICADORES

- Confirme o indicador da fita.
- Confirme o indicador da embalagem.
- Confirme o indicador interior à embalagem.
- Confirme se o IB foi processado.
- Confirme a extração de ar com o indicador Hélix.

●●● matachana

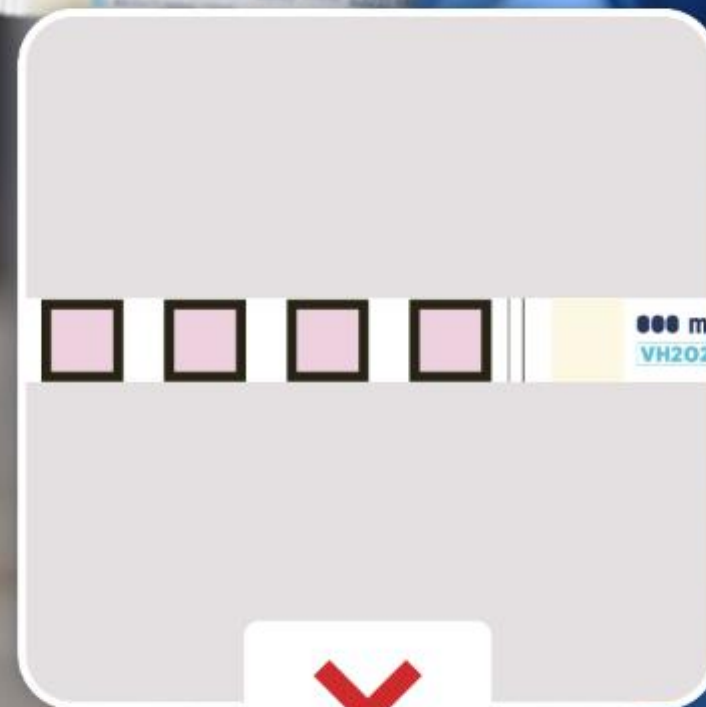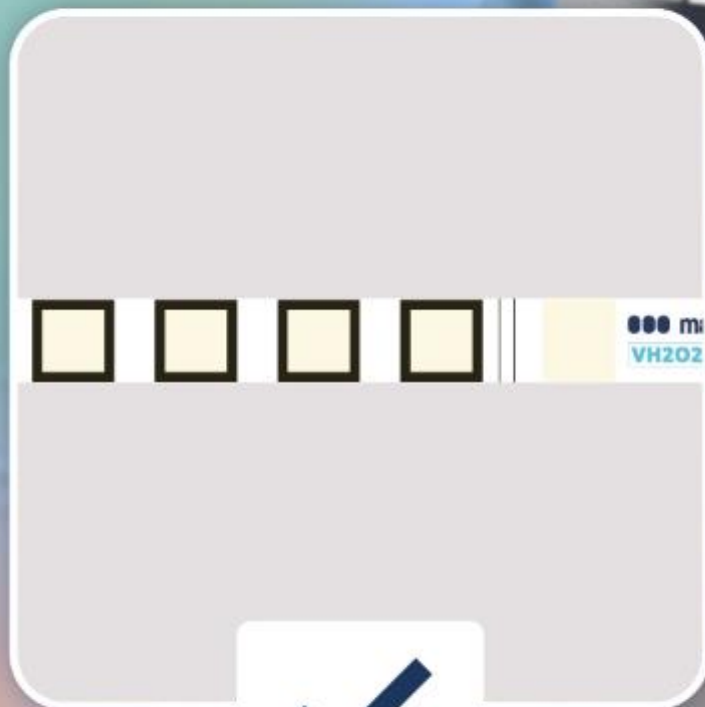

© **ANTONIO MATACHANA, S.A.** 2020

DIREITOS AUTORAIS

Todos os direitos reservados. Este conteúdo é de propriedade intelectual de Antonio Matachana, S.A. A reprodução total ou parcial das informações é estritamente proibida, assim como sua tradução, cópia ou manipulação por qualquer meio ou em qualquer formato de mídia sem a autorização expressa do proprietário dos direitos. O uso não autorizado e qualquer violação dos direitos de propriedade intelectual ou industrial de Antonio Matachana, S.A. resultarão em uma ação legal.

CONTEÚDO

Este é um vídeo promocional. Devido à constante evolução de nossos equipamentos, o conteúdo deste documento pode sofrer algumas alterações.