

# REPLACEMENT BLUKAT®





## Remplacement BluKat®

### 1. VÉRIFICATION NIVEAU DU BLUKAT®

- Vérifiez la couleur de la LED pour connaître le niveau de la solution stérilisante.
- Cliquez sur l'icône BluKat® pour voir l'état du niveau de la solution stérilisante.



130HPO®



18  
Cycles

50HPO®



30  
Cycles



130HPO<sup>®</sup>



5  
Cycles

50HPO<sup>®</sup>



8  
Cycles



130HPO<sup>®</sup>



2  
Cycles

50HPO<sup>®</sup>



2  
Cycles





Remplacement  
BluKat®

Tch  
52.8 °C

Pch  
1007.4 hPa




1. VÉRIFICATION  
NIVEAU DU BLUKAT®

- Vérifiez la couleur de la LED pour connaître le niveau de la solution stérilisante.
- Cliquez sur l'icône BluKat® pour voir l'état du niveau de la solution stérilisante.

BluKat:



30 cycles

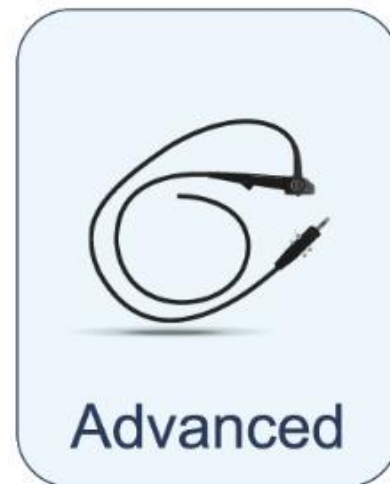



## Remplacement BluKat®



Tch  
52.8 °C

Pch  
1007.4 hPa



### 1. VÉRIFICATION NIVEAU DU BLUKAT®

- BluKat® Numéro de lot et date d'expiration.
- Nombre de cycles restants.
- Jours restants avant la date d'expiration.

## BluKat



Numéro lot:

18001

Date expiration:

07-2021

Restant: 30 cycles

Valide: 30 jours





## Remplacement BluKat®



Tch  
52.8 °C

Pch  
1007.4 hPa



### 1. VÉRIFICATION NIVEAU DU BLUKAT®

- BluKat® Numéro de lot et date d'expiration.
- Nombre de cycles restants.
- Jours restants avant la date d'expiration.

## BluKat



Numéro lot:

18001

Date expiration:

07-2021

Restant: 30 cycles

Valide: 30 jours





## Remplacement BluKat®



Tch  
52.8 °C

Pch  
1007.4 hPa



### 1. VÉRIFICATION NIVEAU DU BLUKAT®

- BluKat® Numéro de lot et date d'expiration.
- Nombre de cycles restants.
- Jours restants avant la date d'expiration.

## BluKat



Numéro lot:

18001

Date expiration:

07-2021

Restant: 30 cycles

Valide: 30 jours





## Remplacement BluKat®

### 2. EFFECTUER LE CYCLE DE VIDANGE

- Le stérilisateur indiquera quand il n'y a plus de solution stérilisante ou si celle-ci est périmée.
- Appuyez sur le bouton du cycle de vidange.
- Appuyez sur le bouton "play".

Lorsqu'il n'y a plus de solution stérilisante disponible.



Tch	Pch
52.8 °C	1007.4 hPa

 ARRÊT PROCESSUS

**E21 Solution stérilisante épuisée. Remplacez BluKat.**





## Remplacement BluKat®

### 2. EFFECTUER LE CYCLE DE VIDANGE

- Le stérilisateur indiquera quand il n'y a plus de solution stérilisante ou si celle-ci est périmée.
- Appuyez sur le bouton du cycle de vidange.
- Appuyez sur le bouton "play".

Lorsque la solution stérilisante  
a expiré.






## Remplacement BluKat®

### 2. EFFECTUER LE CYCLE DE VIDANGE

- Le stérilisateur indiquera quand il n'y a plus de solution stérilisante ou si celle-ci est périmée.
- Appuyez sur le bouton du cycle de vidange.
- Appuyez sur le bouton "play".

Quand le récipient BluKat® doit être remplacé.

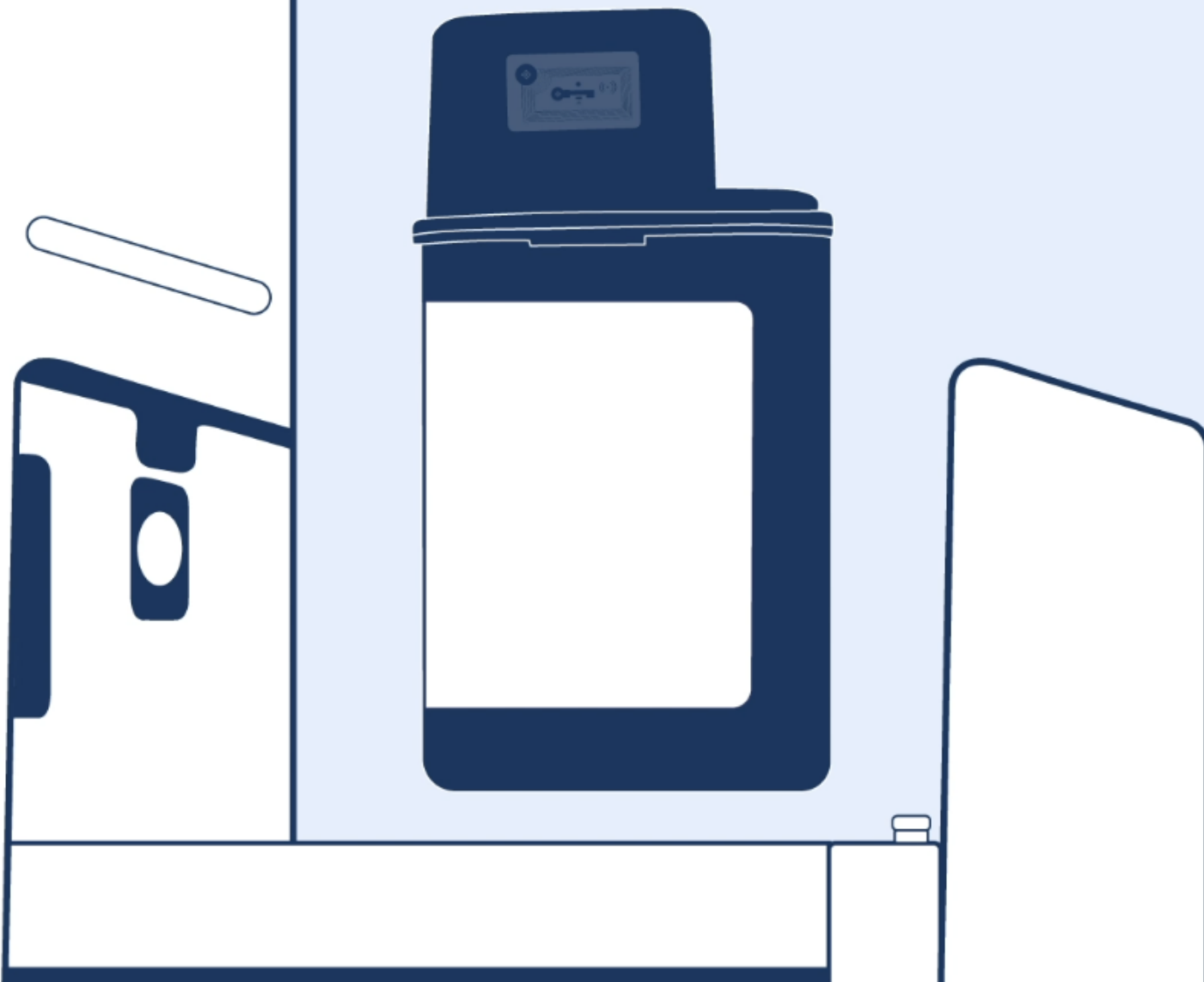



## Remplacement BluKat®

### 2. EFFECTUER LE CYCLE DE VIDANGE

- Le stérilisateur indiquera quand il n'y a plus de solution stérilisante ou si celle-ci est périmée.
- Appuyez sur le bouton du cycle de vidange.
- Appuyez sur le bouton "play".

# HPO

The screenshot shows the HPO control panel interface. At the top, there is a red indicator bar. Below it, the main display area is divided into several sections:

- Temperature and Pressure:** Tch 52.8 °C and Pch 1007.4 hPa.
- Power Button:** A power icon in the top right corner.
- BluKat Status:** A red box next to the text "BluKat" and "0 cycles".
- Door Status:** An icon of a door with the number "1" next to it.
- Cycle Selection:** Three buttons labeled "Rapid", "Advanced", and "Standard", each with a corresponding icon (a syringe, a coiled tube, and a pair of scissors).
- Other Functions:** Three buttons at the bottom: a person icon, a printer icon, and a container icon.



Remplacement  
BluKat®



Tch  
52.8 °C

Pch  
1007.4 hPa



## 2. EFFECTUER LE CYCLE DE VIDANGE

- Le stérilisateur indiquera quand il n'y a plus de solution stérilisante ou si celle-ci est périmée.
- Appuyez sur le bouton du cycle de vidange.
- Appuyez sur le bouton "play".

## BluKat



Numéro lot:

18001

Date expiration:

07-2021

Restant: **0 cycles**

Valide: 8 jours





Remplacement  
BluKat®



Tch  
52.8 °C

Pch  
1007.4 hPa



Vidange  
BluKat



## 2. EFFECTUER LE CYCLE DE VIDANGE

- Le stérilisateur indiquera quand il n'y a plus de solution stérilisante ou si celle-ci est périmée.
- Appuyez sur le bouton du cycle de vidange.
- Appuyez sur le bouton "play".

Temps restant

00:33







Remplacement  
BluKat®

2. EFFECTUER LE CYCLE  
DE VIDANGE

- Confirmez le cycle de vidange du BluKat®.
- La durée totale dépendra de la quantité de solution stérilisante restante.

Tch  
52.8 °C

Pch  
1007.4 hPa



C'est un **PROGRAMME DE TEST**  
Le matériel ne sera pas stérile !  
Exécuter ce test ?





Remplacement  
BluKat®



Tch  
52.8 °C

Pch  
1007.4 hPa



2. EFFECTUER LE CYCLE  
DE VIDANGE

- Confirmez le cycle de vidange du BluKat®.
- La durée totale dépendra de la quantité de solution stérilisante restante.



Vidange  
BluKat



**PROGRAMME  
EN COURS**

Temps restant

**00:25**





## Remplacement BluKat®

### 3. ENLEVEZ LE BLUKAT® DU STÉRILISATEUR

- Utilisez des gants.
- Confirmez que le cycle de vidange est terminé en appuyant sur l'icône.





Remplacement  
BluKat®



Tch  
52.8 °C

Pch  
1007.4 hPa



3. ENLEVEZ LE BLUKAT®  
DU STÉRILISATEUR

- Utilisez des gants.
- Confirmez que le cycle de vidange est terminé en appuyant sur l'icône.



Vidange  
BluKat



Complet

Remplacer  
BluKat!







## Remplacement BluKat®

### 3. ENLEVEZ LE BLUKAT® DU STÉRILISATEUR

- Ouvrez la porte pour accéder au récipient de BluKat®.
- Retirez le récipient.
- Respectez les réglementations locales pour l'élimination du récipient vide.







## Remplacement BluKat®

### 3. ENLEVEZ LE BLUKAT® DU STÉRILISATEUR

- Ouvrez la porte pour accéder au récipient de BluKat®.
- Retirez le récipient.
- Respectez les réglementations locales pour l'élimination du récipient vide.





## Remplacement BluKat®

### 3. ENLEVEZ LE BLUKAT® DU STÉRILISATEUR

- Ouvrez la porte pour accéder au récipient de BluKat®.
- Retirez le récipient.
- Respectez les réglementations locales pour l'élimination du récipient vide.






## Remplacement BluKat®

### 4. SORTEZ UN NOUVEAU BLUKAT® DE SA BOÎTE

- Ouvrez la boîte et suivez les instructions.

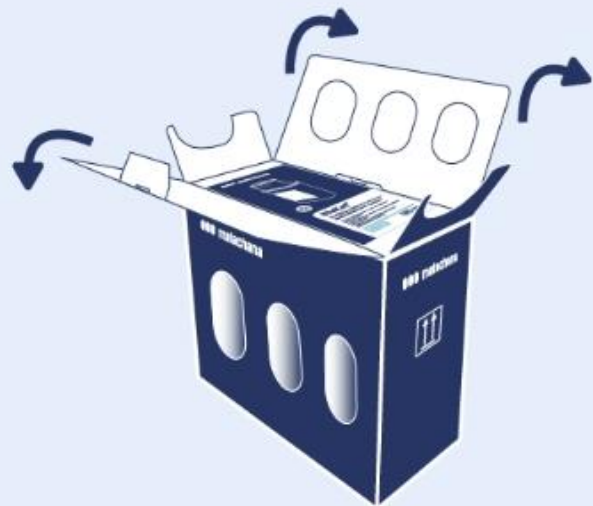

●●● matachana







## Remplacement BluKat®

### 4. SORTEZ UN NOUVEAU BLUKAT® DE SA BOÎTE

- Ouvrez la boîte et suivez les instructions.





## Remplacement BluKat®

### 4. SORTEZ UN NOUVEAU BLUKAT® DE SA BOÎTE

- Ouvrez la boîte et suivez les instructions.



●●● matachana







## Remplacement BluKat®

### 4. SORTEZ UN NOUVEAU BLUKAT® DE SA BOÎTE

- Ouvrez la boîte et suivez les instructions.



●●● matachana





## Remplacement BluKat®

### 4. SORTEZ UN NOUVEAU BLUKAT® DE SA BOÎTE

- Ouvrez la boîte et suivez les instructions.





## Remplacement BluKat®

5. PLACEZ UN NOUVEAU BLUKAT®  
DANS LE STÉRILISATEUR

- Appuyez sur l'icône pour déverrouiller le compartiment BluKat®.
- Utilisez des gants.
- Insérez le BluKat® dans son compartiment, en vous assurant qu'il est placé dans la bonne position.



Tch  
52.8 °C

Pch  
1007.4 hPa



### BluKat



Numéro lot:

Date expiration:

Restant:            cycles

Valide: jours







## Remplacement BluKat®

### 5. PLACEZ UN NOUVEAU BLUKAT® DANS LE STÉRILISATEUR

- Appuyez sur l'icône pour déverrouiller le compartiment BluKat®.
- Utilisez des gants.
- Insérez le BluKat® dans son compartiment, en vous assurant qu'il est placé dans la bonne position.





## Remplacement BluKat®

### 5. PLACEZ UN NOUVEAU BLUKAT® DANS LE STÉRILISATEUR

- Appuyez sur l'icône pour déverrouiller le compartiment BluKat®.
- Utilisez des gants.
- Insérez le BluKat® dans son compartiment, en vous assurant qu'il est placé dans la bonne position.







## Remplacement BluKat®

### 5. PLACEZ UN NOUVEAU BLUKAT® DANS LE STÉRILISATEUR

- Poussez le tiroir pour le fermer.
- Le stérilisateur lira automatiquement l'étiquette RFID.
- Les nouvelles informations de BluKat® seront affichées.





## Remplacement BluKat®

### 5. PLACEZ UN NOUVEAU BLUKAT® DANS LE STÉRILISATEUR

- Poussez le tiroir pour le fermer.
- Le stérilisateur lira automatiquement l'étiquette RFID.
- Les nouvelles informations de BluKat® seront affichées.





## Remplacement BluKat®



Tch  
52.8 °C

Pch  
1007.4 hPa



5. PLACEZ UN NOUVEAU BLUKAT®  
DANS LE STÉRILISATEUR

- Poussez le tiroir pour le fermer.
- Le stérilisateur lira automatiquement l'étiquette RFID.
- Les nouvelles informations de BluKat® seront affichées.

## BluKat



Numéro lot:


18001

Date expiration:

07-2021

Restant:: 30 cycles

Valide: 30 jours

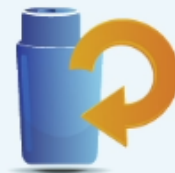

© **ANTONIO MATACHANA, S.A.** 2020

## **COPYRIGHT**

Tous droits réservés. Ce contenu est la propriété intellectuelle de Antonio Matachana, S.A. Toute reproduction totale ou partielle de l'information et sa traduction, copie ou manipulation par tout moyen ou dans tout support sans l'autorisation expresse du propriétaire des droits est formellement interdite. L'utilisation non autorisée et toute violation des droits de propriété intellectuelle ou industrielle de Antonio Matachana, S.A. donnera lieu à une action en justice.

## **CONTENU**

Ceci est une vidéo promotionnelle. En raison de l'évolution constante de nos appareils, les contenus compris dans ce matériel peuvent faire l'objet de modifications.